

Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten

Die SHP-Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsnormen hergestellt. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Allgemein**

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder harte Bürsten. Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche alkohol- und chlorfreie Desinfektionsmittel und -verfahren aus der Liste des RKI¹ oder der Desinfektionsmittelliste des VAH².

Bei Inkontinenz empfehlen wir den Einsatz eines Inkontinenz-Vollbezuges.

- Kerne: Matratzen und Sitzkissen, CareWave FITLEG**

Die Produkte können mit Seifenwasser und einem feuchten Lappen sowie mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, z. B. Desinfektionstüchern durch vorsichtiges Reiben gereinigt werden.

Die Desinfektion der Produkte kann mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren (Autoklavieren) erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Produkte mit viscoelastischem Anteil bei max. 75 °C, die anderen Kerne bei max. 105 °C autoklaviert werden.

- CareWave**

Die Lagerungshilfen können im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

- CareWave Reverso**

Diese Lagerungshilfsmittel können bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

- Bezüge**

Die Bezüge können – wenn in der Gebrauchsanweisung nicht anders angegeben – in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

- Wiedereinsatz**

Die meisten SHP-Produkte sind wiedereinsatzfähig.

Der Wiedereinsatz der SHP-Produkte ist generell nur nach einer Reinigung, Desinfektion und Prüfung zum Wiedereinsatz sowie Beachtung der *Kontrollliste für den Wiedereinsatz* möglich. Ob Ihr Produkt für den Wiedereinsatz geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

¹ Robert Koch-Institut

² Verbund für Angewandte Hygiene e. V.



Wiedereinsatz von SHP-Produkten

Kontrollliste für den Wiedereinsatz

I	Prüfung der Grundvoraussetzung	ja	nein
	zweckentsprechender Einsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	zulässige Kombination von Matratze und Matratzenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gebrauchsanweisung vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II	Prüfung der Matratze	ja	nein
	Verformungen, Kuhlen oder Beschädigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verschmutzung der Matratze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verschleiß-/Abnutzungserscheinungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III	Prüfung des Bezug	ja	nein
	keine Risse/Löcher/aufgetrennte Nähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	sauber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	verschleiß-/abnutzungsfrei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ausreichend Elastizität und Spannkraft vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Etikett vorhanden und lesbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reißverschluss intakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn in Block I und III vollständig in der linken und in Block II vollständig in der rechten Spalte angekreuzt wurde, kann das Produkt bedenkenlos erneut eingesetzt werden. Bei Kreuzen in der rechten Spalte von Block III: erwägen Sie den Austausch des Bezuges.

Gesamtbewertung	
Matratze wiederverwendbar? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Bezug wiederverwendbar? ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Datum: _____._____._____ Prüfer: _____ <div style="text-align: right; font-size: small;">in Druckbuchstaben</div>	Unterschrift

