

## Gebrauchsanweisung

### CareWave Hemi-Armkissen (HMV-Nr. 11.11.05.0017)

#### • Produktbeschreibung

Das CareWave Hemi-Armkissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe für die oberen Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung eingesetzt werden kann. Das zweiteilige Lagerungsmittel besteht aus einem zylindrischen Kissen als Unterlage und einem rechteckigen Kissen mit langgezogenen Ecken für eine anatomische Anpassung an den Körper und kann mittels Klettverschluss variabel an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.

#### • Indikation

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren und zur Lagerung der Unterarme ist das CareWave Hemi-Armkissen indiziert.

#### • Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CareWave Hemi-Armkissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperteile. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Die Mikro-polystyrol-Füllung passt sich gut an die jeweilige anatomische Körperkontur an und entlastet die Beuge- und Streckmuskulatur.

Die hauptsächliche Anwendung des CareWave Hemi-Armkissens erfolgt in sitzender Position des Patienten/Bewohners durch Auflage der zylindrischen Kissenbasis auf den rechten, linken bzw. beide Oberschenkel, wobei der Klettverschluss nach oben zeigt. Die Kissenbasis wird mit der Armauflage, zur individuellen Positionierung und Weichlagerung des gesamten Unterarmes sowie zur definierten Druckentlastung im Ellbogenbereich, durch Klettband fest verbunden. So wird der Unterarm sicher entlastet und in seiner Position fixiert. Gleichzeitig werden die Zugkräfte im Schultergelenk wirksam reduziert.

#### • Anwendungsbereich

Das CareWave Hemi-Armkissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung im Rollstuhl bzw. jedem anderen Sitzmöbel.

#### • Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigaretteglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

#### • Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des zweiteiligen Lagerungskissens besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Beide Kissenanteile sind mit jeweils einem breiten Klettverschluss versehen. Das Produkt ist flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



## Gebrauchsanweisung

### CareWave Hemi-Armkissen (HMV-Nr. 11.11.05.0017)


#### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Größe	Farbe	Gewicht	GTIN
NEG0889	45 x 30 + 30 x ø 13 cm	XS	grün	0,54 kg	4056538996007
NEG0732	58 x 36 + 48 x ø 16 cm	XL	blau	0,77 kg	4056538998674

#### • Technische Daten

HMV-Nr.	11.11.05.0017
Füllung	100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) und Klettverschluss
Pflege	

#### • Ansicht

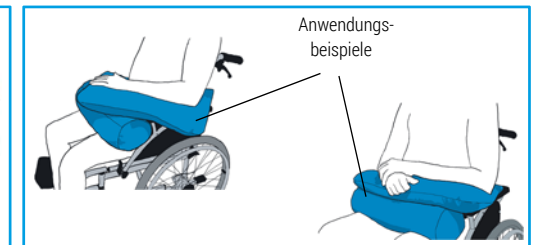

#### • Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.