

Gebrauchsanweisung CareWave Ringkissen (HMV-Nr. 11.11.05.0013)

• Produktbeschreibung

Das CareWave Ringkissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe des Kopf- und Halsbereiches sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung eingesetzt werden kann. Es ist ein ringförmiges Kissen mit einer Öffnung, die mittels eines Druckknopfs verschlossen werden kann.

• Indikation

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren – vornehmlich im Kopf- und Cervikalbereich des Patienten/Bewohners – ist das CareWave Ringkissen indiziert.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CareWave Ringkissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperregionen. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Durch die Mikropolystyrol-Füllung formt sich das Kissen bequem an die anatomischen Strukturen an und entlastet die Muskulatur in diesem Bereich. Es dient der Weichlagerung und Stabilisierung des Kopfes und der angrenzenden Halspartie. Der Kopf wird sicher positioniert, so dass die Pflegeperson beide Hände zur Bewegungsförderung des Patienten einsetzen kann.

Die hauptsächliche Anwendung des CareWave Ringkissens erfolgt in der Rücken- oder Seitenlage bzw. im Sitzen des Patienten/Bewohners, wobei das Kissen um den Hals des Anwenders gelegt und mittels Druckknopf verschlossen und so fixiert wird.

Es kann ebenfalls zur Unterfütterung der Unterschenkel und Freilagerung der Fersen oder bei Platzierung unter den Oberschenkeln mit der offenen Seite des Kissens in Richtung Kopf zur Entlastung des Sakralbereiches durch partielle Freilagerung angewendet werden.

• Anwendungsbereich

Das CareWave Ringkissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett bzw. Liegemöbel. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Erfolgt die Verwendung des CareWave Ringkissens in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Kissens in die Seitengitter zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert. In diesem Fall empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Bezuges Lenzing FR®. Dieser Bezug mit integriertem Flammenschutz vereint Inkontinenzschutz mit einer hautfreundlichen, textilen Oberfläche und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des Lagerungskissens bestehen zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Mittels eines Druckknopfs an kurzem Gummiband kann der Ring verschlossen werden. Das Produkt ist flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Der zusätzliche Bezug Lenzing FR® ist in einer Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C waschbar und bei niedriger Temperatur trocknergeeignet.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung CareWave Ringkissen (HMV-Nr. 11.11.05.0013)

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Größe	Farbe	Gewicht	GTIN
NEG0880	106 x 15 cm	XS	grün	0,24 kg	4056538998278
NEG0612	130 x 20 cm	XL	blau	0,42 kg	4056538998810

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.11.05.0013
Füllung	100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
Pflege	

• Zubehör

Name	Bezug Lenzing FR® für NEG0612
Artikelnummer	NEG0633HLEN
Größe	130 x 20 cm
GTIN	4056538002319
Zusammensetzung	außen: 70 % Lyocell, 30 % Viscose innen: 100 % Polyurethan
Schwerentflammbarkeit	dauerhaft schwer entflammbar
Pflege	

• Ansicht



• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.