

## Gebrauchsanweisung CareWave Universalkissen (HMV-Nr. 11.11.05.0011)

### • Produktbeschreibung

Das CareWave Universalkissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung eingesetzt werden kann. Es ist ein rechteckiges Kissen, das multifunktional zur Lagerung verschiedener Körperbereiche zur Anwendung kommt.

### • Indikation

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren – vornehmlich der oberen und unteren Extremitäten – ist das CareWave Universalkissen indiziert.

### • Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CareWave Universalkissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Die Mikropolystyrol-Füllung passt sich gut an die jeweilige anatomische Körperkontur an und fixiert diese sicher. Das Kissen wird direkt an der abstützenden Körperpartie lagestabil positioniert und kann mittels Zupfen in seine endgültige Position gebracht werden, um positive Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung zu erreichen. Es ist – bei hoher Stützwirkung – weich und komfortabel und entlastet wirksam dekubitusgefährdete Bereiche.

Die hauptsächlichliche Anwendung des CareWave Universalkissens erfolgt in der Rückenlage des Patienten/Bewohners durch Unterfütterung und Weichlagerung der oberen bzw. unteren Extremitäten, wobei speziell im Bereich der unteren Extremitäten eine Freilagerung der Ferse ermöglicht wird. Es kann ebenfalls zur Stützung und Weichlagerung des Kopfes oder zur Gewährleistung der Abduktion im Kniebereich durch physiologischen Positionierung der Beine mit Verhinderung des Aneinanderliegens der Knieinnenseiten verwendet werden.

Bei der seitlichen Lagerung von Patienten/Bewohnern dient es zur Abstützung des Rückens oder wird zwischen den Beinen platziert, um ein Aufeinanderliegen zu verhindern oder eine Positionierung in Neutralstellung zu ermöglichen.

Eine Anwendung in sitzender Position von Patienten/Bewohnern, beispielsweise zur Stützung und Weichlagerung eines hemiparetischen Unterarmes und zur Druckentlastung im Ellbogenbereich ist ebenfalls möglich.

### • Anwendungsbereich | Funktion

Das CareWave Universalkissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett, im Rollstuhl bzw. jedem anderen Sitz- oder Liegemöbel. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

### • Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Erfolgt die Verwendung des CareWave Universalkissens in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Kissens in die Seitengitter zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert. In diesem Fall empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Bezuges Lenzing FR®. Dieser Bezug mit integriertem Flammenschutz vereint Inkontinenzschutz mit einer hautfreundlichen, textilen Oberfläche und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

### • Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des Lagerungskissens besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Das Produkt ist somit flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Der zusätzliche Bezug Lenzing FR® ist in einer Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C waschbar und bei niedriger Temperatur trocknergeeignet.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.



## Gebrauchsanweisung CareWave Universalkissen (HMV-Nr. 11.11.05.0011)

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Größe	Farbe	Gewicht	GTIN
NEG0881	45 x 30 cm	XS	grün	0,27	4056538999176
NEG0605	60 x 40 cm	XL	blau	0,54	4056538999060
NEG0750	70 x 50 cm	XXL	blau	0,9	4056538998520
NEG0606	40 x 30 cm	(2 Stück)	blau	0,46	4056538998506

### • Technische Daten

HMV-Nr.	11.11.05.0011
Füllung	100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
Pflege	

### • Zubehör

Name	Bezug Lenzing FR® für NEG0605
Artikelnummer	NEG0628HLEN
Größe	60 x 40 cm
GTIN	4056538002265
Zusammensetzung	außen: 70 % Lyocell, 30 % Viscose innen: 100 % Polyurethan
Schwerentflammbarkeit	dauerhaft schwer entflammbar
Pflege	

### • Ansicht



### • Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

