

Gebrauchsanweisung DEKU BASIC

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

- Produktbeschreibung**

Die Antidekubitusmatratze DEKU BASIC ist ein Medizinprodukt, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalulzerationen bestimmt ist. Der einschichtige PU-Schaumstoffkern ist mit Quereinschnitten durchzogen, die die Liegefläche in 7 Zonen aufteilen.

- Indikation**

Die Matratze DEKU BASIC dient der Prophylaxe und Therapieunterstützung von Dekubitalgeschwüren. Sie ist für schmerzempfindliche Patienten/Bewohner geeignet.

- Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die Matratze DEKU BASIC wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die durch die Quereinschnitte entstandene Struktur passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten/Bewohners an und sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Der Auflagedruck kann sich auf eine größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert.

- Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKU BASIC verhindern. Die Weichlagerungsmatratze DEKU BASIC kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der DEKU BASIC dürfen Patienten mit einem Gewicht von 20 kg bis maximal 120 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet.

- Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die DEKU BASIC ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen!
Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.
Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.
Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.
Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z.B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

- Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus einem einschichtigen Polyurethan-Schaumstoff und kann bei Bedarf mit handelsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.
Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein blauer Trikotbezug. Dieser Bezug ist atmungsaktiv und schwer entflammbar. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit handelsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Wird der zusätzlich erhältliche PU-Bezug eingesetzt, sollte die Wisch- oder Sprühdeseinfektion ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die DEKU BASIC ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz hygienisch aufzubereiten und auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

Die Herstellung der Matratzen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung DEKU BASIC

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

- Lagerung**

Die DEKU BASIC darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.

- Maße**

| Artikelnummer | Abmessungen | Bezug | Gewicht | GTIN |
|---------------|-------------------|------------------|---------|---------------|
| M31075 | 200 x 90 x 12 cm | Trikotbezug blau | 6,45 kg | 4056538002432 |
| M31076 | 200 x 100 x 12 cm | Trikotbezug blau | 6,70 kg | 4056538002449 |

- Technische Daten**

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Patientengewicht BMI | 20–120 kg 17–35 kg |
| Raumgewicht Stauchhärte | 32 kg/m³ 3,0 kPa |
| Trikotbezug blau | 100 % Baumwolle |
| Brandschutznorm | DIN EN 597 Teil I + II |
| Pflege | Kern |
| | Bezug |

- Ansicht**



- Hinweis**

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.