

## Gebrauchsanweisung PREVENTIX STYLEX (HMV-Nr. 11.29.05.2008) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### • Produktbeschreibung

Die Weichlagerungsmatratze PREVENTIX STYLEX ist ein Medizinprodukt, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalulzerationen bestimmt ist. Sie ist eine Schaumstoffmatratze mit 180 einsteckbaren Schaumstoffwürfeln in vier verschiedenen Höhen und zwei Formen, die durch einen Gitterrahmen in Form gehalten werden. Der patentierte Aufbauplan ermöglicht es, gezielt Be- und Entlastungszonen zum besonderen Schutz der Risikozonen (Schulter, Kreuzbein, Fersen) zu schaffen. Die Würfel in diesen Risikozonen sind zusätzlich kreuzweise an der Oberfläche eingekerbt, so dass sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche verteilen kann. Die Matratze wird komplett einsatzbereit – dem Aufbauplan entsprechend – ausgeliefert. Dessen ungeachtet können die Würfel auch individuell angeordnet werden, um auf spezifische Anforderungen bei der Pflege des Patienten/Bewohners einzugehen.

### • Indikation

Die Matratze PREVENTIX STYLEX dient der Prophylaxe und Therapieunterstützung von Dekubitalgeschwüren. Sie ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

### • Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Die Würfelmatratze PREVENTIX STYLEX wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip. Durch die Würfel in verschiedenen Höhen und mit abgerundeten Kanten passt sich die Matratzenoberfläche optimal den Körperkonturen und Bewegungen des Patienten/Bewohners an und sorgt für eine gute Luftzirkulation. Der Auflagedruck kann sich auf eine größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebereale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Durch die Weichlagerungsfläche wird ein hoher Liegekomfort und eine statische Druckentlastung erreicht.

### • Anwendungsbereich

Die Matratze für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der PREVENTIX STYLEX verhindern. Die Weichlagerungsmatratze PREVENTIX STYLEX kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der PREVENTIX STYLEX dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet.

### • Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Die PREVENTIX STYLEX ist für Patienten/Bewohner mit Schimmelpilzallergien nicht einzusetzen!

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.

Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z.B. Zigarette, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

### • Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus 180 Würfeln aus hochelastischem HR-Schaumstoff, die in einem Gitterrahmen aus PVC platziert werden und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein blauer, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammbarer Inkontinenzbezug SHP-PROTECT. Dieser Bezug ist atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig und schwer entflammbar. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- und Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die PREVENTIX STYLEX ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz hygienisch aufzubereiten und auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

## Gebrauchsanweisung PREVENTIX STYLEX (HMV-Nr. 11.29.05.2008) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die Herstellung der Matratzen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

### • Lagerung

Die PREVENTIX STYLEX darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M28528	200 x 90 x 17 cm	Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau	15 kg	4056538001909

### • Technische Daten

HMV-Nummer	11.29.05.2008			
Patientengewicht   BMI	40–140 kg   17–35			
Raumgewicht   Stauchhärte	55 kg/m³   3,4 kPa			
Gitterrahmen	PVC			
Inkontinenzbezug SHP-PROTECT	43 % Polyester, 57 % Polyurethan			
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II			
Pflege	Kern			
	Bezug			
Garantie	5 Jahre bei Bildung von Liegemulden			

### • Ansicht

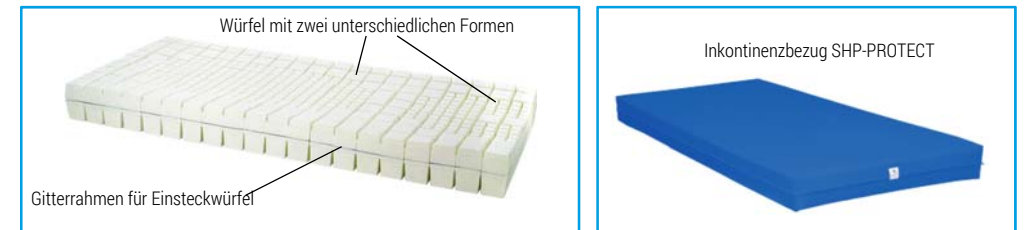

### • Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen,  
aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

