

Gebrauchsanweisung SHP-CUBE Würfelsitzkissen Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Indikationen und Einsatzbereiche

Das Antidekubitus-Rollstuhl- und Sitzkissen SHP-CUBE Würfelskissen ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch den Einsatz von Kaltschaum ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Das SHP-CUBE Würfelskissen ist für schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Das SHP-CUBE Würfelskissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen nicht einzusetzen. Patienten mit einer Schaumstoffallergie dürfen nicht auf dem Sitzkissen gelagert werden.

Anwendungsbereich

Das Antidekubitus-Sitzkissen SHP-CUBE Würfelskissen ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitusgeschwüren bestimmt ist. Es ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Das SHP-CUBE Würfelskissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Es ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls oder einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können. Auf dem SHP-CUBE Würfelskissen dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 125 kg gelagert werden. Die ideale Einsatztemperatur liegt zwischen 10 °C und 40 °C. Das SHP-CUBE Sitzkissen ist standardmäßig mit einem anthrazitgrauen Inkontinenzbezug ausgestattet.

Bitte beachten Sie.

- dass der Einsatz des SHP-CUBE Würfelskissens nicht die regelmäßigen notwendigen Positionierungswechsel des Patienten vollständig ersetzt.
- dass bei der Positionierung des Patienten ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden zu vermeiden ist.
- dass der Patient bei Anwendung des SHP-CUBE Würfelskissens über Eigenbewegungen verfügt.

Das SHP-CUBE Würfelskissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

Funktionsbeschreibung

Das SHP-CUBE Würfelskissen wird aus einem hochelastischen Polyurethanschaum gefertigt. Die Sitzfläche ist mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten durchzogen, wodurch ca. 25 würfelförmige Formen entstehen. Die Würfelstruktur macht das Kissen sehr atmungsaktiv, zudem wird die Oberfläche deutlich flexibler und kann sich so optimal den Körperkonturen anpassen. Das dient der Vorbeugung von Druckgeschwüren (Rötungen und Hautschädigungen durch fehlende Druckverteilung). Das Würfelsitzkissen wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet. Durch die Eigenbewegungen bzw. die Gewichtsverlagerungen des sitzenden Patienten erfolgt eine wechselseitige Druckreduzierung. Somit wird die Durchblutung in den jeweils weniger belasteten Geweberealen abwechselnd verbessert und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus verringert. Durch den abnehmbaren Inkontinenzbezug wird das Sitzkissen vor Verunreinigungen geschützt. Eine Trageschleife an der Einstiegsseite erleichtert die Handhabung und den Transport. Der Sitzkissenbezug ist abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bei max. 90 °C gewaschen werden.

Das SHP-CUBE ist wiedereinsatzfähig. Vor dem Wiedereinsatz (z. B. Patientenwechsel) sind das Sitzkissen und der Sitzkissenbezug hygienisch aufzubereiten sowie anhand der Checkliste für den Wiedereinsatz zu prüfen.



Gebrauchsanweisung SHP-CUBE Würfelsitzkissen Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Anwendung

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetriebV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko sowie vorhandene Dekubitusgeschwüre beurteilen zu können.

- Überprüfen Sie das Antidekubitus-Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des SHP-CUBE Würfelskissens geeignet ist. Beachten Sie dabei die Anforderungskriterien der Sitzgelegenheit im Kapitel Anwendungsbereich.
- Öffnen Sie den Deckel der Kartonverpackung und entnehmen Sie das SHP-CUBE Würfelskissen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
- Der Bezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen.
- Legen Sie das SHP-CUBE Sitzkissen mit der Reißverschlusskante nach unten auf die Sitzfläche der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl usw.). Die Trageschleife muss zum Einstieg zeigen.

Pflege und Reinigung | Wiedereinsatz

Die Herstellung des SHP-CUBE Würfelskissens unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.


Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht
K17989	43 x 43 x 7 cm	0,7 kg

Technische Daten

Patientengewicht	40–125 kg
Material Raumgewicht Stauchhärte	Polyurethanschaum 50 kg/m ³ 8,0 kPa
Bezug	Inkontinenzbezug: Komfort 205 g/m ² , anthrazit

Ansicht

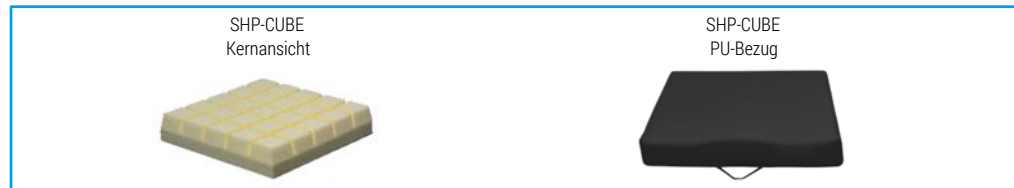

Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigaretteglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

