

Gebrauchsanweisung SHP-CARGUMIXT (HMV-Nr. 11.29.05.0012)

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Indikationen und Einsatzbereiche

Die Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze SHP-CARGUMIXT ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „mittel“) als auch zur Dekubitus-therapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch die Weichlagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-CARGUMIXT ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-CARGUMIXT ist für Patienten mit Schaumstoffallergien nicht geeignet. Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenz-Bezug auf alle Fälle verwendet werden! Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbegrenzungen für diese Matratze.

Anwendungsbereich

Die SHP-CARGUMIXT ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-CARGUMIXT verhindern. Die Weichlagerungsmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-CARGUMIXT dürfen Patienten mit einem Gewicht von 30 kg bis maximal 120 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-CARGUMIXT ist standardmäßig mit einem nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Inkontinenz-Bezug AG-PROTECT in der Farbe blau ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-CARGUMIXT ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

Funktionsbeschreibung

Die SHP-CARGUMIXT ist eine Schaumstoffmatratze mit ununterbrochener Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-CARGUMIXT wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitus-therapieunterstützung kann sie bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet werden. Der Kern (200 x 90 x 14 cm) besteht aus einer durchgehenden, 10 cm starken Grundplatte aus HR-Schaum mit zonierten Quereinschnitten zur besseren ergonomischen Anpassung an den Patienten und einer 4 cm starken Auflagefläche aus viscoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis. Die Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten an. Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Durch Kombination der beiden Schaumstoffschichten verteilen sich die entstehenden Auflagedrucke flächiger und werden reduziert. Exponierte Körperbereiche, wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen, werden besonders stark entlastet. Auf Grund der zwei unterschiedlichen Schaumstoffschichten mit unterschiedlichen Raumgewichten, Stauchhärten und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von schweren Patienten (bis 120 kg) verhindert. Die SHP-CARGUMIXT wurde für ein Patientengewicht von 30–120 kg konzipiert. Die Weichlagerungsmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Inkontinenz-Bezug AG-PROTECT ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 90 °C waschbar.

Die SHP-CARGUMIXT ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Pflege und Reinigung* sowie *Wiedereinsatz von Softline-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung SHP-CARGUMIXT (HMV-Nr. 11.29.05.0012)

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Lagerung

Die entpackte SHP-CARGUMIXT darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.

Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M19431	200 x 90 x 14 cm	Inkontinenz-Bezug AG-PROTECT blau	11,8 kg
M19432	200 x 100 x 14 cm	Inkontinenz-Bezug AG-PROTECT blau	13,2 kg

Technische Daten

Patientengewicht BMI	30–120 kg 15–35
Raumgewicht Stauchhärte	Trägerkern: 45 kg/m ³ 3,8 kPa Deckplatte: 65 kg/m ³ 2,2 kPa
Bezug	Inkontinenz-Bezug AG-PROTECT, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden
HMV-Nummer	11.29.05.0012

Ansicht



Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!