

Gebrauchsanweisung DEKULAST BASIC (HMV-Nummer: 11.29.05.0052) Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Produktbeschreibung

Die Antidekubitus-Schwerlastmatratze DEKULAST BASIC ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalulzationen bestimmt ist. Die zweischichtige Schaumstoffmatratze besteht aus einem HR-Schaumstoffkern mit 7-Zonen-Schnitt und einer Weichlagerungsauflage aus PU-Schaumstoff. Sie ist mit einer verstärkten Randzone zur leichteren Mobilisierung von Patienten/Bewohnern und einem Duplexschnitt in der Randzone – zur verbesserten Anpassung an die Bettkinematik – ausgestattet. Die Schaumstoffteile sind mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf überzogen und von einem schwer entflammaren Polyurethanvollschutzbezug umgeben.

• Indikation

Die Matratze DEKULAST BASIC dient der Prophylaxe und Therapieunterstützung (bis Kategorie IV nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen zum effizienten Dekubitusmanagement. Sie ist für bariatrische und schmerzempfindliche Patienten/Bewohner geeignet.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Die Schwerlastmatratze DEKULAST BASIC wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die Weichlagerungsauflage aus PU-Schaumstoff ermöglicht eine konturgenaue Anpassung an den Patienten, so dass der Auflagedruck auf eine wesentlich größere Fläche verteilt wird, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und das Risiko eines Dekubitus minimiert. Durch die Weichlagerungsoberfläche in Kombination mit dem 7-Zonen-HR-Schaumkern wird ein hoher Liegekomfort und eine statische Druckentlastung erreicht.

• Anwendungsbereich

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar – unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit. Sollte diese überschritten werden, ist ein geeignetes Schwerlastbett einzusetzen. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKULAST BASIC verhindern. Die Schwerlastmatratze DEKULAST BASIC kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, die für das entsprechende Patientengewicht zugelassen sind. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden.

Auf der DEKULAST BASIC dürfen Patienten/Bewohner mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 250 kg gelagert werden.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und bestehende Risiken beurteilen zu können. Die DEKULAST BASIC ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen! Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen (ggf. ist eine Erhöhung für die Standardseitengitter vom Bettenhersteller zu nutzen). Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarette, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus einer Schicht HR-Schaumstoff und einer Schicht PU-Schaumstoff und kann bei Bedarf mit handelsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 105 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein dunkelblauer Inkontinenzbezug ECO. Dieser Bezug ist atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig sowie schwer entflammbar und wird der Matratze beigelegt. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit handelsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- und Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch das Robert Koch-Institut (RKI) oder den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die DEKULAST BASIC ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreibV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

Gebrauchsanweisung DEKULAST BASIC (HMV-Nummer: 11.29.05.0052) Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die Herstellung der Matratzen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

• Lagerung

Die DEKULAST BASIC darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M31077	200 x 90 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	12,7 kg	4056538002456
M31078	200 x 100 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	14,1 kg	4056538002463
M31079	200 x 120 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	17,1 kg	4056538002470
M31080	200 x 140 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	20,1 kg	4056538002487
M31081	220 x 90 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	14,1 kg	4056538002494
M31082	220 x 100 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	15,6 kg	4056538002500
M31083	220 x 120 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	18,9 kg	4056538002517
M31084	220 x 140 x 18 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	22,0 kg	4056538002524

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.29.05.0052		
Patientengewicht	40–250 kg		
Raumgewicht Stauchhärte Eindruckhärte	Grundplatte:	50 kg/m ³ 3,8 kPa 150 N	
	Deckplatte:	40 kg/m ³ 3,7 kPa 150 N	
	Randzone:	35 kg/m ³ 5,5 kPa 240 N	
Inkontinenzbezug ECO	42 % Polyester, 58 % Polyurethan		
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach Crib 5		
Aufbereitung und Pflege	Kern		
	Bezug		

• Ansicht

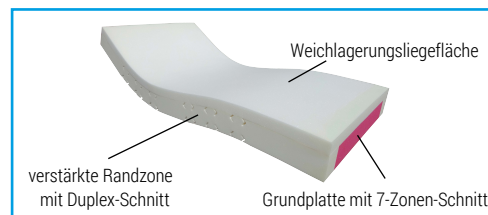

• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

