

## Gebrauchsanweisung DEKU BASIC (HMV-Nr. 11.29.05.1042)

### Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### • Produktbeschreibung

Die Antidekubitusmatratze DEKU BASIC ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalzerationen bestimmt ist. Der einschichtige PU-Schaumstoffkern ist mit Quereinschnitten durchzogen, die die Liegefläche in 7 Zonen aufteilen. Die Matratze ist von einem Trikotbezug umgeben.

#### • Indikation

Die Matratze DEKU BASIC dient der Prophylaxe und Therapieunterstützung (bis Kategorie IV nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen zum effizienten Dekubitusmanagement. Sie ist für schmerzempfindliche Patienten/Bewohner geeignet.

#### • Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Die Matratze DEKU BASIC wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die durch die Quereinschnitte entstandene Struktur passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten/Bewohners an und sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Der Auflagedruck kann sich auf eine größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebearale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert.

#### • Anwendungsbereich

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKU BASIC verhindern. Die Weichlagerungsmatratze DEKU BASIC kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden.

Auf der DEKU BASIC dürfen Patienten mit einem Gewicht von 20 kg bis maximal 120 kg gelagert werden

#### • Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und bestehende Risiken beurteilen zu können.

Die DEKU BASIC ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen!

Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nur bei den Artikelnummern M33574 und M33575 im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen (ggf. ist eine Erhöhung für die Standardseitengitter vom Bettenhersteller zu nutzen).

Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

#### • Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus einem einschichtigen Polyurethan-Schaumstoff und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 105 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammbarer Trikotbezug. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Wird der zusätzliche PU-Bezug eingesetzt, sollte die Wisch- oder Sprühdeseinfektion ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch das Robert Koch-Institut (RKI) oder den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Der Bezug kann in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 95 °C gewaschen werden. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die DEKU BASIC ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreibV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen.



## Gebrauchsanweisung DEKU BASIC (HMV-Nr. 11.29.05.1042)

### Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die Herstellung der Matratzen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

#### • Lagerung

Die DEKU BASIC darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


#### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M31075	200 x 90 x 12	Trikotbezug	6,5 kg	4056538002432
M33574	200 x 90 x 12	Trikotbezug + Inkontinenzbezug ECO beigelegt	7,0 kg	4056538002838
M31076	200 x 100 x 12	Trikotbezug	6,7 kg	4056538002449
M33575	200 x 100 x 12	Trikotbezug + Inkontinenzbezug ECO beigelegt	7,3 kg	4056538002807

#### • Technische Daten

HMV-Nr.	11.29.05.1042
Patientengewicht   BMI	20–120 kg   17–35 kg
Raumgewicht   Stauchhärte	32 kg/m³   3,0 kPa
Trikotbezug	100 % Baumwolle Brandschutznorm: DIN EN 597 Teil I + II
Inkontinenzbezug ECO	42 % Polyester, 58 % Polyurethan Brandschutznorm: schwer entflammbar nach Crib 5
Pflege	Kern
	Trikotbezug
	Inkontinenzbezug

#### • Ansicht

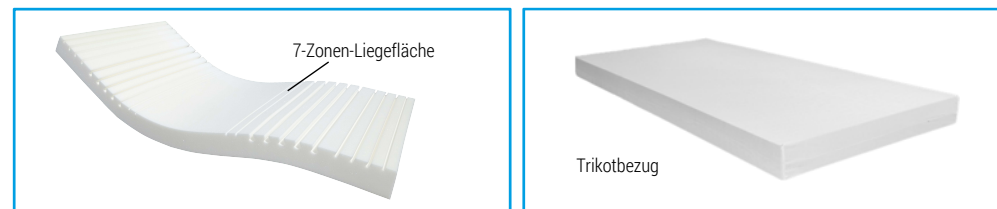

#### • Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.