

Gebrauchsanweisung SHP-DEKU Noppenauflage SOFT

Weichlagerungsauflage zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Indikationen und Einsatzbereiche

Die SHP-DEKU Noppenauflage Soft ist nur für einen Einsatz in Verbindung mit einer Standardpflegebettmatratze geeignet. Durch die Weichlagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine statische Druckentlastung möglich. Die SHP-DEKU Noppenauflage ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-DEKU Noppenauflage ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Anwendungsbereich

Die SHP-DEKU Noppenauflage Soft ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett (inklusive Matratze) muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-DEKU Noppenauflage Soft in Verbindung mit der Standardpflegebettmatratze verhindern. Die Weichlagerungsauflage SHP-DEKU Noppenauflage Soft kann auf einer Standardpflegebettmatratze auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Auflage erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzen- bzw. Auflagenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Auflage darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-DEKU Noppenauflage Soft (in Verbindung mit einer Standardpflegebettmatratze) dürfen Patienten mit einem Gewicht von 25 kg bis maximal 125 kg bei einer Höhe von 40 mm und von 30 kg bis maximal 130 kg bei einer Höhe von 70 mm gelagert werden. Die Auflage ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-DEKU Noppenauflage Soft ist lieferbar mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem blauen, nach CRIB 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT, welcher bei vorliegender Inkontinenz auf alle Fälle verwendet werden sollte!

Der Einsatz der SHP-DEKU Noppenauflage Soft ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsauflage ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

Funktionsbeschreibung

Die SHP-DEKU Noppenauflage Soft ist eine Auflage mit noppenartiger Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-DEKU Noppenauflage Soft wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitusunterstützung kann sie bis einschließlich Kategorie I (nach EPUAP) verwendet werden. Sie besteht aus einem viscoelastischen Schaumstoff mit noppenartiger Oberfläche, die sich optimal den Körperkonturen des Patienten anpasst. Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. In Kombination mit einer Standardpflegebettmatratze verteilen sich die entstehenden Auflagedrucke auf eine größere Fläche und werden reduziert. Exponierte Körperbereiche, wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen, werden besonders stark entlastet. Auf Grund des Einsatzes eines viscoelastischen Schaumstoffes mit hohem Raumgewicht und speziell ausgewählter Stauch- und Eindruckhärte wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 125 kg bzw. bis 130 kg) verhindert. Sie wurde für ein Patientengewicht von 25–125 kg (bei 40 mm Höhe) und 30–130 kg (bei 70 mm Höhe) konzipiert. Die Weichlagerungsauflage ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet. Diese schützen vor Verunreinigungen und sind in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 60 °C (Trikotbezug) bzw. bis 90 °C (Inkontinenzbezug) waschbar.

Die SHP-DEKU Noppenauflage Soft ist eine wiedereinsatzbare Auflage. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung SHP-DEKU Noppenauflage SOFT

Weichlagerungsauflage zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Lagerung

Die entpackte SHP-DEKU Noppenauflage Soft darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M18878	200 x 90 x 4 cm	Trikot DIN blau	5,0 kg
M18879	200 x 90 x 4 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	5,0 kg
M18880	200 x 90 x 7 cm	Trikot DIN blau	6,2 kg
M18881	200 x 90 x 7 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	6,2 kg

Technische Daten

Patientengewicht BMI	4 mm Höhe: 25–125 kg 10–35 7 mm Höhe: 30–130 kg 10–35
Raumgewicht Stauchhärte	4 mm Höhe: 50 kg/m ³ 2,2 kPa 7 mm Höhe: 80 kg/m ³ 2,0 kPa
Bezug	Inkontinenzbezug KOMFORT, schwer entflammbar nach CRIB 5 Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II

Ansicht

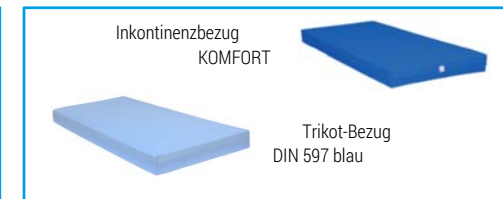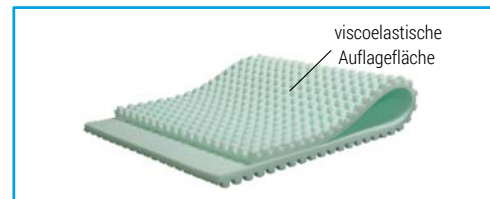

Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

