

Gebrauchsanweisung SHP-DEKUCARE VISCO (HMV-Nr. 11.29.05.0041) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Indikationen und Einsatzbereiche

Die Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze SHP-DEKUCARE VISCO ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „hoch“) als auch zur Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie III nach EPUAP) geeignet. Durch die Weichlagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-DEKUCARE VISCO ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

• Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-DEKUCARE VISCO ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

• Anwendungsbereich

Die SHP-DEKUCARE VISCO ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-DEKUCARE VISCO verhindern. Die Weichlagerungsmatratze SHP-DEKUCARE VISCO kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-DEKUCARE VISCO dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-DEKUCARE VISCO ist lieferbar mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Inkontinenzbezug AG-PROTECT, welcher bei vorliegender Inkontinenz auf alle Fälle verwendet werden sollte!

Der Einsatz der SHP-DEKUCARE VISCO ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

• Funktionsbeschreibung

Die SHP-DEKUCARE VISCO ist eine Schaumstoffmatratze mit würfelförmiger Innenstruktur und ununterbrochener Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-DEKUCARE VISCO wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitustherapieunterstützung kann sie bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) verwendet werden. Sie besteht aus einem Schaumstoffkern und Schaumstoffdeckel. Der PU-Schaumstoffkern ist mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten durchzogen. Die dadurch entstehende würfelförmige Innenstruktur passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten an. Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Der Kern (200 x 90 x 14 cm) besteht aus 84 würfelförmigen Formen mit einer Auflagefläche von 9 x 9 cm und einer Höhe von 5 cm, einem verstärkten Sakralbereich (ohne Quereinschnitte) für eine optimale Druckentlastung beim Sitzen sowie Randverstärkungen von 14,5 cm (ohne Längseinschnitte). Die Auflagefläche besteht aus einem weichen, nicht strukturierten, viscoelastischen Schaumstoff. In Kombination mit der Innenstruktur verteilen sich die entstehenden Auflagedrucke auf eine größere Fläche und werden reduziert. Exponierte Körperbereiche, wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen, werden besonders stark entlastet. Auf Grund der zwei Schaumstoffschichten mit unterschiedlichen Raumgewichten, Stauch- und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 140 kg) verhindert. Sie wurde für ein Patientengewicht von 40–140 kg konzipiert. Die Antidekubitusmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem schwer entflammaren Inkontinenzbezug AG-PROTECT ausgestattet. Diese schützen vor Verunreinigungen und sind in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 60 °C (Trikotbezug) bzw. bis 90 °C (Inkontinenzbezug) waschbar.

Die SHP-DEKUCARE VISCO ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung SHP-DEKUCARE VISCO (HMV-Nr. 11.29.05.0041) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Lagerung

Die entpackte SHP-DEKUCARE VISCO darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17483	200 x 90 x 14 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	12,3 kg
M17821	200 x 100 x 14 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	13,6 kg
M17732	200 x 90 x 14 cm	Trikot DIN blau	11,5 kg
M17902	200 x 100 x 14 cm	Trikot DIN blau	12,8 kg

• Technische Daten

Patientengewicht BMI	40–140 kg 17–35
Druckentlastung	bei 80 kg: Klasse H; bei 130 kg: Klasse H
Raumgewicht Stauchhärte Eindruckhärte	Würfelfern: 45 kg/m ³ 3,2 kPa 120 N Deckplatte: 47 kg/m ³ 1,2 kPa 60 N
Bezug	Inkontinenzbezug AG-PROTECT, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden
HMV-Nummer	11.29.05.0041

• Ansicht

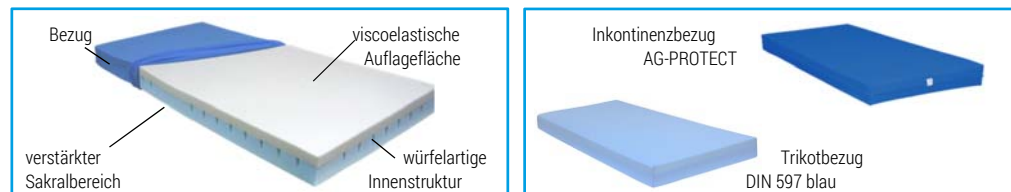

• Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

