

Gebrauchsanweisung SHP-DEKUCARE VISCO XII

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Indikationen und Einsatzbereiche

Die Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze SHP-DEKUCARE VISCO XII ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „hoch“) als auch zur Dekubitus-therapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch die Weichlagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-DEKUCARE VISCO XII ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-DEKUCARE VISCO XII ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.
Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbegrenzungen für diese Matratze.

Anwendungsbereich

Die SHP-DEKUCARE VISCO XII ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-DEKUCARE VISCO XII verhindern. Die Weichlagerungsmatratze SHP-DEKUCARE VISCO XII kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-DEKUCARE VISCO XII dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 110 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-DEKUCARE VISCO XII ist lieferbar mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Inkontinenzbezug AG-PROTECT, welcher bei vorliegender Inkontinenz auf alle Fälle verwendet werden sollte!

Der Einsatz der SHP-DEKUCARE VISCO XII ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

Funktionsbeschreibung

Die SHP-DEKUCARE VISCO XII ist eine Schaumstoffmatratze mit würfelförmiger Innenstruktur und ununterbrochener Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-DEKUCARE VISCO XII wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitus-therapieunterstützung kann sie bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet werden. Sie besteht aus einem Schaumstoffkern und Schaumstoffdeckel. Der PU-Schaumstoffkern ist mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten durchzogen. Die dadurch entstehende würfelförmige Innenstruktur passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten an. Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Der Kern (200 x 90 x 12 cm) besteht aus 84 würfelförmigen Formen mit einer Auflagefläche von 9 x 9 cm und einer Höhe von 5 cm, einem verstärkten Sakralbereich (ohne Quereinschnitte) für eine optimale Druckentlastung beim Sitzen sowie Randverstärkungen von 14,5 cm (ohne Längseinschnitte). Die Auflagefläche besteht aus einem weichen, nicht strukturierten, viscoelastischen Schaumstoff. In Kombination mit der Innenstruktur verteilen sich die entstehenden Auflagedrucke auf eine größere Fläche und werden reduziert. Exponierte Körperbereiche, wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen, werden besonders stark entlastet. Auf Grund der zwei Schaumstoffschichten mit unterschiedlichen Raumgewichten, Stauch- und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von schweren Patienten (bis 110 kg) verhindert.

Die Weichlagerungsmatratze ist entweder mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem schwer entflammaren Inkontinenzbezug AG-PROTECT ausgestattet. Diese schützen vor Verunreinigungen und sind in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 90 °C waschbar.

Die SHP-DEKUCARE VISCO XII ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung SHP-DEKUCARE VISCO XII

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Lagerung

Die entpackte SHP-DEKUCARE VISCO XII darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 16 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
SO-M25428	200 x 90 x 12 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	10,3 kg

Technische Daten

Patientengewicht BMI	40–110 kg 17–30
Raumgewicht Stauchhärte	Würfeln: 45 kg/m ³ 3,2 kPa 120 N Deckplatte: 47 kg/m ³ 1,2 kPa 60 N
Bezug	Inkontinenzbezug AG-PROTECT, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

Ansicht

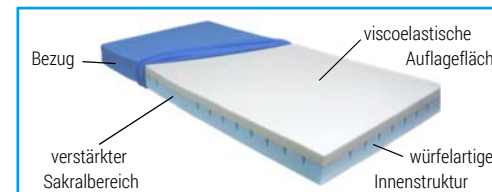

Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitze einwirkung. Es besteht Brandgefahr!

