

## Gebrauchsanweisung SHP-ERGOMATT DUPLEX (HMV-Nr. 11.29.05.1004) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### • Indikationen und Einsatzbereiche

Die Weichlagerungsmatratze SHP-ERGOMATT DUPLEX ist für die Dekubitusprophylaxe geeignet. Durch die Weichlagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-ERGOMATT DUPLEX ist für schmerzempfindliche Patienten gut geeignet.

### • Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-ERGOMATT DUPLEX ist für Patienten mit Schaumstoffallergien nicht geeignet.  
Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!  
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

### • Anwendungsbereich

Die SHP-ERGOMATT DUPLEX ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist speziell für den Einsatz in Pflegebetten mit viergeteilter Liegefläche konzipiert. Auf Grund der speziellen SHP-Duplex-Konstruktion ist die SHP-ERGOMATT DUPLEX auch in vielen anderen Pflegebetten sehr gut einsetzbar.

Das Bett muss eine stabile Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-ERGOMATT DUPLEX verhindern. Die Weichlagerungsmatratze SHP-ERGOMATT DUPLEX kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-ERGOMATT DUPLEX dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-ERGOMATT DUPLEX ist standardmäßig mit einem blauen, nach CRIB 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-ERGOMATT DUPLEX ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

### • Funktionsbeschreibung

Die SHP-ERGOMATT DUPLEX ist eine Schaumstoffmatratze mit einer homogenen und punktelastischen Liegefläche. Sie dient zur Reduzierung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-ERGOMATT DUPLEX wird zur Dekubitusprophylaxe am ganzen Körper eingesetzt. Der Kern (205 x 92 x 14 cm) besteht aus einer homogenen Liegefläche, welche sich auf Grund der SHP-Duplex-Einschnitte optimal an die vierteilige Liegefläche des Bettes anpassen kann sowie einer Randzone zur Unterstützung der Mobilisierung der Patienten. Die SHP-ERGOMATT DUPLEX wurde für ein Patientengewicht von 40–140 kg konzipiert. Die Weichlagerungsmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 90 °C waschbar.

Die SHP-ERGOMATT DUPLEX ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



## Gebrauchsanweisung SHP-ERGOMATT DUPLEX (HMV-Nr. 11.29.05.1004) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

### • Lagerung

Die entpackte SHP-ERGOMATT DUPLEX darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.

### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
P26472	205 x 92 x 14 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	12,5 kg

### • Technische Daten

Patientengewicht   BMI	40–140 kg   17–35
Raumgewicht   Stauchhärte	Kern: 40 kg/m <sup>3</sup>   3,5 kPa Randzone: 50 kg/m <sup>3</sup>   8,0 kPa
Bezug	Inkontinenzbezug KOMFORT, schwer entflammbar nach CRIB 5
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

### • Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!