

Gebrauchsanweisung SHP-TERRALAST L Standardpflegebettmatratze

• Indikationen und Einsatzbereiche

Die SHP-TERRALAST L ist eine Standardpflegebettmatratze aus hochelastischem Polyurethanschaum. Für behandelnde Maßnahmen wie Dekubitus-therapie darf sie nicht eingesetzt werden.

• Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-TERRALAST L ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

• Anwendungsbereich

Die SHP-TERRALAST L ist für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-TERRALAST L verhindern. Die Standardpflegebettmatratze SHP-TERRALAST L kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-TERRALAST L dürfen Patienten mit einem Gewicht von 90 kg bis maximal 150 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-TERRALAST L ist standardmäßig mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Trikotbezug ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-TERRALAST L ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Die Standardpflegebettmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

• Funktionsbeschreibung

Die SHP-TERRALAST L ist eine Standardpflegebettmatratze aus Polyurethanschaum mit einer ununterbrochenen Liegefläche. Sie besteht aus einem einteiligen hochelastischen PU-Schaumstoffkern RG 40, mit den Maßen 200 x 90 x 12 cm oder 200 x 100 x 12 cm, der keinerlei Längs- und Quereinschnitte aufweist. Der Polyurethanschaum ist atmungsaktiv und nicht toxisch. Er wird FCKW-frei geschäumt und nach Oeko-Tex Standard 100 hergestellt und geprüft. Die SHP-TERRALAST L wurde für ein Patientengewicht von 90–150 kg konzipiert. Auf Grund des Raumgewichtes, der Stauch- und Eindruckhärte wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 150 kg) verhindert. Die Standardpflegebettmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven blauen Trikotbezug ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 60 °C waschbar.

• Lagerung

Die entpackte SHP-TERRALAST L darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



Gebrauchsanweisung SHP-TERRALAST L Standardpflegebettmatratze

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17909	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,9 kg
M18722	220 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	9,8 kg
M17751	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	9,9 kg
M18697	220 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	10,9 kg
M17911	200 x 120 x 12 cm	Trikot DIN blau	11,7 kg
M18698	220 x 120 x 12 cm	Trikot DIN blau	13,1 kg
M18723	200 x 140 x 12 cm	Trikot DIN blau	13,8 kg
M18721	220 x 140 x 12 cm	Trikot DIN blau	15,2 kg

• Technische Daten

Patientengewicht	90–150 kg
Raumgewicht Stauchhärte Eindruckhärte	40 kg/m³ 5,2 kPa 210 N
Bezug	Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II

• Ansicht



• Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigaretten- glut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitze einwirkung. Es besteht Brandgefahr!

