

Gebrauchsanweisung

CareWave Mikrolagerungskissen

- **Produktbeschreibung**

Das CareWave Mikrolagerungskissen ist eine statische Positionierungshilfe, die an druckintensiven Körperpartien zur flächigen Druckumverteilung eingesetzt wird. Das kleine rechteckige Kissen besteht aus einem an allen Seiten fest geschlossenen, bi-elastischen, polyurethanbeschichteten Polyamidbezug, der mit einer definierten Menge an Mikropolystyrolkugeln kleiner Granulierung befüllt ist.

Das Bezugsmaterial ist formbeständig, flüssigkeits-, bakterien- und virendicht, wasserdampfdurchlässig, schwer entflammbar, beständig gegen Desinfektionsmittel und langlebig.

Es ist als Einzelkissen oder Set von drei Kissen gleicher Größe erhältlich.

- **Indikation**

CareWave Mikrolagerungskissen dienen der physiologischen Positionsveränderung in Gelenken sowie zur unterstützenden Lageveränderung durch Druckumverteilung an Kopf, Hals, Schultern, Thorax, Becken, Ober- und Unterschenkel oder im Fersenbereich und unterstützen so bei der Vorbeugung des Auftretens von Dekubitus.

- **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Das Kissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip, wird vollflächig unter der zu entlastenden Körperpartie platziert und für die Dauer von ca. 10–15 Minuten am Einsatzort belassen. Danach wird es entfernt und an einer anderen zu entlastenden Körperregion eingesetzt. Häufigkeit und Kontinuität in der Nachahmung physiologischer Bewegungsmuster durch kleinste Schwerpunktverlagerungen sind von entscheidender Bedeutung, um eine dekubitusprophylaktische Wirkung zu erzielen und die Verbesserung der natürlichen Blutzirkulation im Gewebe zu gewährleisten. Eine Druckentlastung von bestimmten Körperarealen – wie bei der Makrolagerung – wird nicht erzielt.

Die leicht verschiebbliche Füllung des Kissens ermöglicht eine konturgenaue Anpassung an anatomische Strukturen und vergrößert so die aufliegende Fläche.

- **Anwendungsbereich**

Das CareWave Mikrolagerungskissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett, im Rollstuhl bzw. jedem anderen Sitz- oder Liegemöbel.

- **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Erfolgt die Verwendung des CareWave Mikrolagerungskissens in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter bzw. eine Patientengefährdung zu vermeiden und einer Beschädigung des Kissens vorzubeugen.

Bitte beachten Sie die vorgesehene Anwendungsdauer!

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Er muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

- **Material | Pflege und Reinigung**

Die Füllung des Lagerungskissens besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Bei Verschmutzung können die CareWave Mikrolagerungskissen mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Das Produkt ist wartungsfrei.




Gebrauchsanweisung CareWave Mikrolagerungskissen


- Maße**

Artikelnummer	Abmessungen	Verpackungseinheit	Farbe	GTIN
NEG2016	30 x 17 cm	1 Stück	blau	4056538002258
NEG2017	30 x 17 cm	3 Stück	blau	4056538002241

- Technische Daten**

Füllung	100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
Pflege	

- Ansicht**

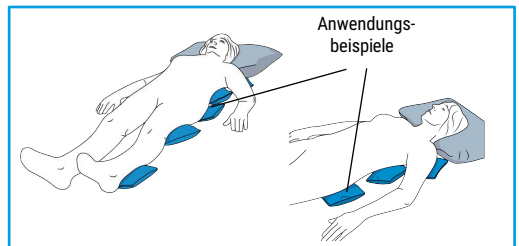

- Hinweis**

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

