

Gebrauchsanweisung DEKUCARE VISCO (HMV-Nr. 11.29.05.0041)

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• **Produktbeschreibung**

Die zweischichtige Weichlagerungsmatratze DEKUCARE VISCO besteht aus einem Schaumstoffkern mit würfelförmiger Struktur (Trägerschicht) und einer durchgehenden viscoelastischen Liegefläche. Die Variante DEKUCARE VISCO RZ Duplex ist zusätzlich mit einer fest-elastischen Randzone – zur leichteren Mobilisierung von Patienten und zur Sturzprophylaxe – sowie einem Duplexschnitt innerhalb der Randzone – zur verbesserten Anpassung an die Bettkinematik – ausgestattet. Die Schaumstoffkomponente ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und von einem Polyurethanvollschutzbezug (Inkontinenzbezug) umgeben oder mit einem Trikotbezug umhüllt.

• **Indikation**

Die Matratze DEKUCARE VISCO dient als druckentlastendes Hilfsmittel zur Verhinderung des Auftretens (Prophylaxe) und zur Behandlungsunterstützung (Therapie) von Dekubitalulzerationen im Zusammenspiel mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen. Sie ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder aufgrund ihres Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist und das Risiko eines Dekubitus besteht. Sie ist für schmerzempfindliche und kachektische Patienten geeignet.

• **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die DEKUCARE VISCO wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an die anatomischen Körperkonturen des Patienten, wobei sich der Auflagedruck auf eine wesentlich größere Fläche verteilt. Dadurch verbessert sich die Durchblutung der Gewebeareale und das Risiko eines Dekubitus wird minimiert. Die Kombination aus Weichlagerungsfläche und stützendem Schaumstoffkern erzeugt einen hervorragenden Liegekomfort und eine hohe statische Druckentlastung.

• **Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Dieses muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKUCARE VISCO verhindern. Die Weichlagerungsmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und nicht ohne Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden. Die DEKUCARE VISCO ist für die Anwendung bei Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg vorgesehen. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die DEKUCARE VISCO ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen! Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzschutzbezuges. Dieser Bezug ist nur bei den Artikelnummern M17483, M17821, M36601 und M36602 im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen. Der Patient/Bewohner darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Er muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

• **Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus elastischem Polyurethanschaum sowie einer Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 75 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist entweder ein blauer Vollschutzbezug SHP-PROTECT (atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig und schwer entflammbar) oder ein blauer Trikotbezug (atmungsaktiv, schwer entflammbar). Die Bezüge sind durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und können im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei max. 95 °C (SHP-PROTECT) oder 60 °C (Trikot) gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) oder das Robert Koch-Institut (RKI) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die Aufbereitung der gesamten Einheit aus Vollschutzbezug und Schaumstoffkern kann – bei geöffnetem Reißverschluss des Bezuges – schonend mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bei 75 °C erfolgen.



Gebrauchsanweisung DEKUCARE VISCO (HMV-Nr. 11.29.05.0041)

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die DEKUCARE VISCO ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetriebV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

• Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze DEKUCARE VISCO schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten. Die Matratze darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (B x T x H)	Ausführung/Bezug	Gewicht	GTIN
M17483	200 x 90 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	11,1 kg	4056538991323
M17732	200 x 90 x 14 cm	Trikotbezug	10,5 kg	4056538998575
M36601	200 x 90 x 14 cm	RZ DUPLEX mit SHP-PROTECT	11,3 kg	4056538003699
M17821	200 x 100 x 14 cm	Vollschutzbezug SHP-PROTECT	12,3 kg	4056538998537
M17902	200 x 100 x 14 cm	Trikotbezug	11,7 kg	4056538998544
M36602	200 x 100 x 14 cm	RZ DUPLEX mit SHP-PROTECT	12,5 kg	4056538003705

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.29.05.0041
Patientengewicht	40–140 kg
Raumgewicht • Stauchhärte • Eindruckhärte	Liegeschicht: 50 kg/m ³ • 1,2 kPa • 60 N Trägerschicht: 45 kg/m ³ • 3,2 kPa • 120 N
Material Inkontinenzbezug • Brandschutznorm	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung • schwer entflammbar nach DIN EN 597
Material Trikotbezug • Brandschutznorm	Polyester • schwer entflammbar nach DIN EN 597
HMV-Druckentlastungsklasse	bei 80 kg: H bei 130 kg: H
Pflege	Kern
	Inkontinenzbezug
	Trikotbezug
Garantie	5 Jahre bei Bildung von Liegemulden

• Ansicht

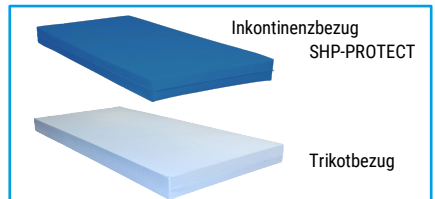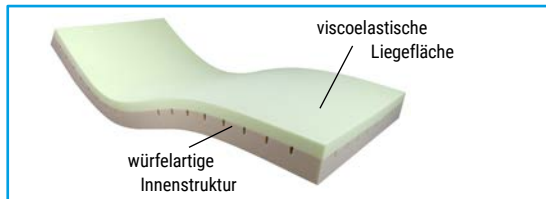

• Hinweis

Die Anwendung des Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

