

Matratze Preventix Mat 5

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Abmessung (in cm)
792344	MATRATZE PREVENTIX MAT 5 - BETTBREITE 90	90 x 200 x 17

Min. Benutzergewicht : 40 kg – Max. Benutzergewicht : 110 kg

Nutzungsbedingungen : Diese Dekubitus-Prophylaxe-Matratze ist für Patienten mit geringem bis mittlerem Dekubitus-Risiko bestimmt, die mehr als 15 Stunden pro 24 Stunden bettlägerig sind, die sich nur schwer selbst mobilisieren können, ohne größere neurologische Störung, ohne Arteriopathie und in gutem bis durchschnittlichem Allgemeinzustand.

Diese Matratze kann als Betauflage zur Unterstützung bei der Behandlung von Druckgeschwüren oder bei postoperativen Druckgeschwüren verwendet werden

- Bei Pflegebedürftigen mit einem oder mehreren Dekubitus der Stufe 1 und/oder 2 außerhalb der Stützzone oder mit der Möglichkeit des Ausschlusses der Stützung, unabhängig davon, ob der Pflegebedürftige tagsüber angehoben wird oder nicht.
- Bei Patienten mit einem Dekubitus des Stadiums 3 oder 4 außerhalb der Auflagezone oder mit der Möglichkeit des Ausschlusses der Auflage
- Mit einem lokalisierten Entlastungssystem
- Bei Patienten mit einem Dekubitus der Stufe 1 oder 2 in der Lagerungszone wird der Patient tagsüber mit einem Positionierungssystem angehoben, und medizinische Hilfskräfte werden dreimal täglich hinzugezogen, um die Lagerung zu überprüfen und den Patienten zu wenden.

Die Matratze Préventix Mat 5 besteht aus unabhängigen und abnehmbaren Würfeln in 4 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Dichten, die durch ein Polyvinylchlorid-Gewebe zusammengehalten werden. Durch den Wechsel der Würfel können Be- und Entlastungszonen in den am meisten gefährdeten Bereichen (Kreuzbein, Fersen, Schultern) geschaffen werden. Die abgerundete Form der Würfel begrenzt die Risiken von Reibung und Scherung.

Hinweise zur Installation und Verwendung der Matratze :

- Prüfen Sie, ob die Maße der Matratze, des Bettes und der Bettgitter zum Körpertyp des Benutzers passen. Prüfen Sie, ob zwischen der unteren Leiste des Bettgitters und der Oberseite der Matratze kein Spalt vorhanden ist. Zwischen der Oberkante des Bettgitters und der Oberseite der Matratze muss ein Mindestabstand von 22 cm bestehen.
- Legen Sie die Matratze nicht auf eine andere Matratze, sondern auf einen Lattenrost. Prüfen Sie, ob der Sockel in gutem Zustand ist, insbesondere, ob er nicht in der Mitte durchhängt.
- Markieren Sie die Verlegerichtung der Matratze.
- Notieren Sie das Verwendungsdatum der Matratze mit einem Marker direkt auf dem Schaumstoff. Bedecken Sie die Matratze nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Bezug oder Schutz. Legen Sie ein Baumwolltuch über den Bezug, stecken Sie es nicht ein, um einen Hängematteneffekt zu vermeiden.
- Unterstützen Sie den Anwender beim ersten Hinlegen und Aufstehen, um Stürze zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung :

- Für den Komfort des Anwenders sollten Baumwollkleidung und Leinen verwendet werden. Vermeiden Sie die Verwendung von synthetischen Kleidungsstücken und Stoffen, die Reibung verursachen und sogar zu einem Verrutschen des Beckens auf dem Bett führen können, mit der Folge, dass die Gefahr besteht, dass die Haut und das Unterhautgewebe abgeschert werden.


- Reinigen Sie bei Inkontinenz den Bezug und eventuell die Matratze. Beim Waschen ist es ratsam, einen Ersatzbezug zu verwenden, um einen direkten Kontakt mit der Matratzenoberfläche zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände auf der Matratze.

Technische Daten :

Schaum	Hochelastischer Polyurethanschaum 26, 34 und 37 kg/m ³
Bezug	Bezug Cartex : 65 % Polyurethan – 35 % Polyester – Crib 5

Brandverhalten des Produkts : entspricht den Normen NF EN 597-1 et NF 597-2

Pflegehinweise :

Bezug Cartex	
Hochelastischer Schaum	Schwamm und Seifenlauge Reinigung mit gesättigtem Dampf ohne Zusatz von Formaldehyd Die Abdeckung sollte erst wieder angebracht werden, wenn der Schaumstoff vollständig getrocknet ist

Vorsichtsmaßnahmen :

Führen Sie eine regelmäßige Sichtprüfung der Abdeckung durch, um eventuelle Beschädigungen der Abdeckung (Löcher, Abrieb, Risse usw.) zu erkennen. Jeder schwerwiegende Zwischenfall mit diesem Medizinprodukt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Lagerung :



Entsorgung :

Verbrennen Sie das gebrauchte Produkt nicht und entsorgen Sie es nicht in der Natur, sondern geben Sie es bei einer Entsorgungsstelle ab, die sich darum kümmert.

Garantie und Service :

Für diese Matratze gilt eine Garantie von 2 Jahren gegen Fabrikationsfehler ab dem Kaufdatum durch den Patienten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf normale Festigkeitsverluste oder Veränderungen der Eigenschaften und/oder der Farbe, die die druckentlastenden Eigenschaften nicht beeinträchtigen. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchs- und Pflegeanleitung verwendet und behandelt wird.

Datum der ersten Anwendung und Stempel des Händlers



PHARMAOUEST INDUSTRIES-PREVENTIX
Z.A. ACTIPOLE 35 – B.P. 12 - 2, rue de Saint-Coulban - F- 35540 MINIAC-MORVAN

Tel. : +49 (0)511 696 59 14 - Fax : +49 (0)511 696 59 17

www.pharmaouest.com - careconcept@pharmaouest.com



Wichtige Informationen für den Patienten und seine Familie :

Diese Matratze ist eine Auflage zur Dekubitusprophylaxe, sie wurde Ihnen verordnet, weil Ihr Gesundheitszustand Ihre Mobilität einschränkt und Sie dem Risiko eines Dekubitus ausgesetzt.

Definition eines Druckgeschwürs : Ein Dekubitus ist eine Hautläsion ischämischen Ursprungs, die auf eine übermäßige und lang anhaltende Kompression des Weichgewebes zwischen bestimmten Körperteilen und einer Auflagefläche zurückzuführen ist. Dieser übermäßige und andauernde Druck kann die Blutzirkulation behindern und zur Bildung eines Druckgeschwürs führen.

Ein Dekubitus kann verschiedene Formen annehmen: eine einfache Rötung, die länger als einen Tag anhält, eine Verhärtung der Haut, eine mehr oder weniger tiefe Wunde, die in den schwersten Fällen die Muskeln oder den darunter liegenden Knochen erreichen kann.

Funktionsweise : Diese Auflage reduziert den Druck und ermöglicht eine bessere Durchblutung der Haut und des Unterhautgewebes, um so zur Vorbeugung von Dekubitus beizutragen.

Gebrauchshinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung : Bitte beachten Sie, dass diese Unterstützung allein nicht ausreicht, um Dekubitus vorzubeugen, auch andere vorbeugende Maßnahmen sind unerlässlich:

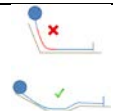
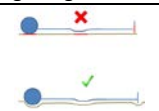
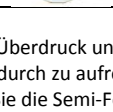
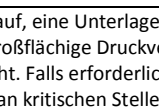
- Wechseln Sie die Position mindestens alle 2 bis 3 Stunden
- Abwechselnd mit statischem oder dynamischem Stehen, wenn möglich
- Pflegen Sie die Hauthygiene und vermeiden Sie Mazerationen
- Bei Inkontinenz wechseln Sie regelmäßig die Schutzvorrichtungen
- Beobachten Sie den Hautzustand täglich oder lassen Sie ihn beobachten
- Stellen Sie sicher, dass die Ernährung ausreichend und angepasst ist
- Trinken Sie regelmäßig und in ausreichender Menge
- Verwenden Sie ggf. zusätzliche Schutzvorrichtungen

Wenn eine dieser Maßnahmen nicht eingehalten werden kann, müssen Sie unbedingt Ihren Arzt oder das Pflegepersonal so schnell wie möglich informieren. Informieren Sie Ihren Arzt oder das Pflegepersonal so schnell wie möglich über abnormale Ereignisse wie Fieber, Schmerzen, Rötungen oder Aufhellungen an den Auflagepunkten (Kopf, Schulter, Rücken, Hüfte, Schulterblatt, Becken, Ferse usw.).

Der Einsatz einer Bandage zur Dekubitusprophylaxe wird von einer therapeutischen Schulung der damit ausgestatteten Person und ihres Umfeldes begleitet. Diese muss von einer medizinischen Fachkraft erbracht werden, die zu Hause oder in einer Einrichtung arbeitet. Es kann ein Folgeheft mit Empfehlungen und Präventivmaßnahmen erstellt werden, um die Präventivmaßnahmen festzuhalten.

Es ist wichtig, die überschüssige Dicke zwischen dem Körper und der Unterlage so weit wie möglich zu begrenzen, mit Ausnahme der Körperbekleidung und eines eventuellen kompletten Wechsels. Tragen Sie vorzugsweise locker sitzende Oberbekleidung aus Baumwolle und möglichst keine Nähte in den Auflagebereichen. Nicht dazwischenlegen: gefaltetes Handtuch oder Laken, zusätzliches Kopfkissen usw. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper wie Schläuche, Krümel, Fett usw. vorhanden sind.

Aus hygienischen Gründen sollte jedes Hilfsmittel zur Dekubitusprophylaxe nur für eine Person reserviert werden.

Die Wirksamkeit der Matratze hängt auch von der richtigen Lagerung der Person ab.	
	
	
Achten Sie auf Überdruck und die Gefahr des Abscherens durch zu aufrechtes Sitzen. Bevorzugen Sie die Semi-Fowler-Position	Achten Sie darauf, eine Unterlage zu wählen, die eine möglichst großflächige Druckverteilung auf den Körper ermöglicht. Falls erforderlich, sorgen Sie für Entlastungen an kritischen Stellen: Hinterkopf, Fersen usw..

ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUES
N° 04/05/2012

Demandeur : CARPENTER SAS

6 rue du Moulin de Groleau
ZI route de Tours
49 490 NOYANT

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Matelas PREVENTIX MAT5

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

- * Mousse HR 28028
- * Mousse HR 34034
- * Mousse HR AM 37035
- * Housse CARTEX - Jersey enduit de polyuréthane - 150 g/m²

rempli(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relative aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° M367100853, M367100854, M367100855, M367110419, M010541-DE/2, M3671120114, M367120115, M367120119, M367120116, M367120118, M367120117, M367120133, M367120120/1, M367120121/1, M367120125/1, M367120122/1, M367120124/1, M367120123/1, M367120126/1, M367120127/1, M3671200131, M367120128/1, M367120130/1, M367120129/1, M367120110

Pour les tests feu : n° 367120256/1, 367120257/1

Pour les mesures de répartition de pression : n° M367120111, M367120112, M367120113

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE D'ESSAIS DES MEUBLES, SIEGES, LITERIE ET COMPOSANTS du FCBA qui décidera de la suite à donner.

Le présent ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une commande de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut émettre ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE
30, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 59 49 59
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr

