



# Gebrauchsanweisung DEKULAST XXL RZ

## Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein Vollschutzbezug Komfort blau. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die Aufbereitung der gesamten Einheit aus Schutzbezug und Schaumstoffkern kann – bei geöffnetem Reißverschluss des Bezuges – schonend mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bei 75 °C erfolgen.

Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

### • Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze DEKULAST XXL RZ schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken. Die Matratze darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Matratzen sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M17684	200 x 100 x 18 cm	Vollschutzbezug Komfort	20,0 kg	4056538999206
M17686	200 x 120 x 18 cm	Vollschutzbezug Komfort	23,8 kg	4056538995567
M17687	200 x 140 x 18 cm	Vollschutzbezug Komfort	27,7 kg	4056538995550
M17685	220 x 100 x 18 cm	Vollschutzbezug Komfort	21,9 kg	4056538995598
M17683	220 x 120 x 18 cm	Vollschutzbezug Komfort	26,0 kg	4056538995574
M17688	220 x 140 x 18 cm	Vollschutzbezug Komfort	30,2 kg	4056538995543

### • Technische Daten

Patientengewicht	18–350 kg		
Raumgewicht • Stauchhärte • Eindruckhärte	Liegeschicht:	50 kg/m <sup>3</sup> • 2,2 kPa • 90 N	
	Stützschiicht:	85 kg/m <sup>3</sup> • 3,0 kPa • 120 N	
	Rückstellschiicht:	50 kg/m <sup>3</sup> • 3,8 kPa • 150 N	
	Grundschiicht:	50 kg/m <sup>3</sup> • 8,0 kPa • 350 N	
	Randzone:	65 kg/m <sup>3</sup> • 11,0 kPa • 490 N	
Material Inkontinenzbezug	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung		
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach BS 7175 – Crib 5		
Aufbereitung und Pflege	Kern		
	Bezug		
Garantie	3 Jahre bei Bildung von Liegemulden		

### • Ansicht

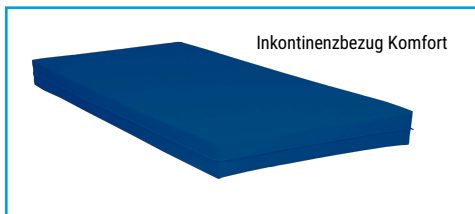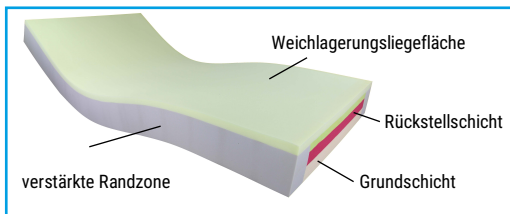

### • Hinweis

Die Anwendung dieses Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

