

Gebrauchsanweisung TERRASOFT

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

• Produktbeschreibung

Die TERRASOFT ist eine einschichtige Pflegebettmatratze mit strukturierter und unterbrochener Liegefläche. Sie besteht aus einem hochelastischen PU-Schaumstoffkern, der auf der Oberseite mit acht schrägen Längseinschnitten durchzogen ist. Der Polyurethanschaum ist atmungsaktiv. Die Schaumstoffkomponente ist mit einem Trikotbezug umhüllt.

• Indikation

Die Pflegebettmatratze TERRASOFT dient als druckverteilendes Hilfsmittel zur Verhinderung des Auftretens (Prophylaxe) von Dekubitalzerationen und ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder aufgrund ihres Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist und das Risiko eines Dekubitus besteht.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Die Matratze TERRASOFT wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die schrägen Längseinschnitte sorgen für die Druckverteilung auf eine größere Auflagefläche und reduzieren somit den Auflagedruck. Dadurch wird die Durchblutung gefährdeter Gewebereale verbessert und das Risiko eines Dekubitus minimiert. Weiterhin verbessern sie die Luftzirkulation innerhalb des Schaumstoffkerns.

• Anwendungsbereich

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Dieses muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der TERRASOFT verhindern. Die Pflegebettmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und nicht ohne Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden.

Die TERRASOFT ist für die Anwendung bei Patienten/Bewohnern mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg vorgesehen

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Die TERRASOFT ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.

Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.

Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarette, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Er muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

• Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus einem einschichtigen Polyurethanschaum und kann bei Bedarf vom Anwender mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch wischdesinfiziert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein blauer, nach DIN EN 597 schwer entflammbarer Trikotbezug. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) oder das Robert Koch-Institut (RKI) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

• Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze TERRASOFT schnellstmöglich nach Erhalt zu unpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten.

Die Matratze darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



Gebrauchsanweisung TERRASOFT

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe


• **Maße**

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M20977	190 x 90 x 12 cm	Trikotbezug	7,1 kg	4056538998209
M17750	200 x 90 x 12 cm	Trikotbezug	7,5 kg	4056538991392
M18680	200 x 100 x 12 cm	Trikotbezug	8,5 kg	4056538991361

• **Technische Daten**

Patientengewicht	40–140 kg			
Raumgewicht • Stauchhärte • Eindruckhärte	40 kg/m ³ • 4,0 kPa • 200 N			
Material Trikotbezug • Brandschutznorm	Polyester • schwer entflammbar nach DIN EN 597			
Pflege	Kern			
	Trikotbezug			

• **Ansicht**

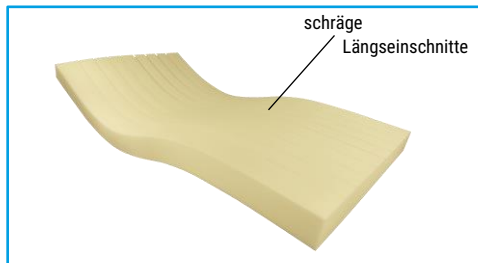

• **Hinweis**

Die Anwendung dieses Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.