

Gebrauchsanweisung

CareWave Halbmondkissen (HMV-Nr. 11.11.05.1014)

• **Produktbeschreibung**

Das CareWave Halbmondkissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung eingesetzt werden kann. Es ist ein körperlanges, schlauchförmiges Kissen in C-Form, das bei der Positionierung und Freilagerung verschiedener Körperteile Anwendung findet.

• **Indikation**

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren – vornehmlich im Sakralbereich bzw. bei allen in Rückenlage des Patienten dekubitusgefährdeten Körperteilen – ist das CareWave Halbmondkissen indiziert.

• **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Das CareWave Halbmondkissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Die Mikropolystyrol-Füllung passt sich gut an die jeweilige anatomische Körperkontur an.

Die hauptsächliche Anwendung des CareWave Halbmondkissens erfolgt in der Rückenlage des Patienten/Bewohners, wobei das Kissen direkt unter Kopf, Hals, Schultern und oberen Extremitäten platziert wird und diese Bereiche sicher stützt, fixiert und druckentlastet. Gleichzeitig liegt es beiderseits seitlich am Rumpf des Anwenders an, ist spürbar und fördert so die Eigenwahrnehmung.

Bei der Anwendung des Kissens im Bereich der unteren Extremitäten – durch mittige Platzierung unter den Oberschenkeln und Knien des Patienten/Bewohners und seitlicher Wegführung der schlauchförmigen Enden in Richtung Becken und Thorax – wird eine Entlastung im Gesäß- und Kreuzbeinbereich sowie eine Unterfütterung des Kniebereiches – zur Vermeidung einer Hohlagerung – erreicht. Dabei fördern die seitlich an Becken und Rumpf anliegenden Kissenenden die Eigenwahrnehmung und bieten gleichzeitig die Möglichkeit der Weichlagerung der oberen Extremitäten.

Das Kissen kann ebenfalls zur seitlichen Positionierung des Anwenders eingesetzt werden, wobei es direkt an den abstützenden Regionen Schulter, Rücken und Becken sowie im Bereich der unteren Extremitäten zwischen den Beinen, zur Verhinderung des Aneinanderliegens der Knie bzw. zur Gewährleistung einer Abduktion in diesem Bereich, platziert wird.

• **Anwendungsbereich**

Das CareWave Halbmondkissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett bzw. Liegemöbel. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Erfolgt die Verwendung des CareWave Halbmondkissens in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Kissens in die Seitengitter zu vermeiden, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert. In diesem Fall empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Bezuges Lenzing FR®. Dieser Bezug mit integriertem Flammschutz vereint Inkontinenzschutz mit einer hautfreundlichen, textilen Oberfläche und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• **Material | Pflege und Reinigung**

Die Füllung des Lagerungskissens besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Das Produkt ist somit flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdesinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Der zusätzliche Bezug Lenzing FR® ist in einer Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C waschbar und bei niedriger Temperatur trocknergeeignet.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.



Gebrauchsanweisung

CareWave Halbmondkissen (HMV-Nr. 11.11.05.1014)

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

Maße

| Artikelnummer | Abmessungen | Größe | Farbe | Gewicht | GTIN |
|---------------|-------------|-------|-------|---------|---------------|
| NEG0882 | 142 x 25 cm | XS | grün | 0,71 kg | 4056538997691 |
| NEG0608 | 180 x 31 cm | XL | blau | 1,21 kg | 4056538998803 |


Technische Daten

| | |
|------------|--|
| HMV-Nr. | 11.11.05.1014 |
| Füllung | 100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung |
| Außenhülle | bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) |
| Pflege | |

Zubehör

| | |
|-----------------------|---|
| Name | Bezug Lenzing FR® für NEG0608 |
| Artikelnummer | NEG0630HLEN |
| Größe | 180 x 31 cm |
| GTIN | 4056538002289 |
| Zusammensetzung | außen: 70 % Lyocell, 30 % Viscose innen: 100 % Polyurethan |
| Schwerentflammbarkeit | dauerhaft schwer entflammbar |
| Pflege | |

Ansicht

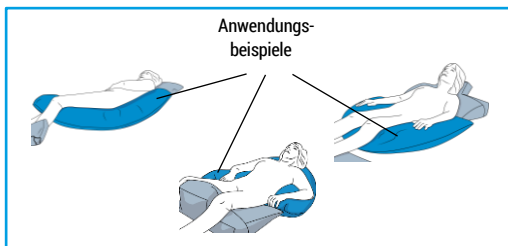

Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

