

Gebrauchsanweisung DEKU Noppenauflage

Weichlagerungsauflage zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• **Produktbeschreibung**

Die DEKU Noppenauflage besteht aus viscoelastischem Schaumstoff mit noppenartiger Liegefläche und darf nur in Verbindung mit einer Standardpflegebettmatratze eingesetzt werden. Sie ist mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethanvollschutzbezug (Inkontinenzbezug) umgeben oder mit einem Trikotbezug umhüllt.

• **Indikationen**

Die DEKU Noppenauflage dient – bei Anwendung auf einer Standardpflegebettmatratze – als druckentlastendes Hilfsmittel zur Verhinderung des Auftretens (Prophylaxe) und zur Behandlungsunterstützung (Therapie) von Dekubitalulzerationen im Zusammenspiel mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen. Sie ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund einer Krankheit, Behinderung oder aufgrund ihres Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist, das Risiko eines Dekubitus besteht bzw. die Behandlungsunterstützung eines bereits bestehenden Dekubitus indiziert ist. Die DEKU Noppenauflage ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten/Bewohner geeignet.

• **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die Auflage wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Durch die viscoelastische Noppenstruktur ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine statische Druckentlastung möglich. In Kombination mit einer Standardpflegebettmatratze verteilt sich der entstehende Auflagedruck auf eine größere Fläche und wird reduziert. Exponierte Körperbereiche – wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen – werden besonders entlastet.

• **Anwendungsbereich**

Die DEKU Noppenauflage ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKU Noppenauflage in Verbindung mit der Standardpflegebettmatratze verhindern. Die DEKU Noppenauflage kann zusammen mit einer Standardpflegebettmatratze auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Auflagen samt Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und nicht ohne Bettlaken, welches auf der Auflage einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die DEKU Noppenauflage (jeweils in Verbindung mit einer Standardpflegebettmatratze) ist für die Anwendung bei Patienten mit einem Gewicht von 25 kg bis maximal 125 kg – bei einer Höhe von 4 cm – und von 30 kg bis maximal 130 kg – bei einer Höhe von 7 cm – vorgesehen.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die Noppenauflage ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht einzusetzen! Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzschutzbezuges. Dieser Bezug ist nur bei den Artikelnummern M18879 und M18881 im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Auflage. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Auflagenoberseite mindestens 22 cm betragen. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Noppenauflage haben. Schützen Sie die Auflage vor offenem Feuer (z. B. Zigarette, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Dieser muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

• **Funktionsbeschreibung**

Die Auflage besteht aus viscoelastischem Schaumstoff und kann bei Bedarf mit handelsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 75 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Auflage ist entweder ein blauer Vollschutzbezug Komfort (atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig und schwer entflammbar) oder ein blauer Trikotbezug (atmungsaktiv, schwer entflammbar). Die Bezüge sind durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und können im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit handelsüblichen Mitteln bis max. 95 °C (Inkontinenzbezug) oder 60 °C (Trikotbezug) gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wischdesinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) oder das Robert Koch-Institut (RKI) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.



Gebrauchsanweisung DEKU Noppenauflage

Weichlagerungsauflage zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die Aufbereitung der gesamten Einheit aus Vollschutzbezug und Schaumstoffkern kann – bei geöffnetem Reißverschluss des Bezuges – schonend mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bei 75 °C erfolgen.

Die DEKU Noppenauflage mit Vollschutzbezug ist wiedereinsetzbar. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreivV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz und zur Aufrechterhaltung der Funktion auszutauschen.

• Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte DEKU Noppenauflage schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten. Die Auflage darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Noppenauflage darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (B x T x H)	Bezug	Gewicht	GTIN
M18878	200 x 90 x 4 cm	Trikotbezug	2,7 kg	4056538995109
M18879	200 x 90 x 4 cm	Vollschutzbezug Komfort	3,0 kg	4056538995123
M18880	200 x 90 x 7 cm	Trikotbezug	8,5 kg	4056538994669
M18881	200 x 90 x 7 cm	Vollschutzbezug Komfort	9,0 kg	4056538994775

• Technische Daten

Patientengewicht	4 cm Höhe: 25–125 kg 7 cm Höhe: 30–130 kg
Raumgewicht • Stauchhärte • Eindruckhärte	4 cm Höhe: 50 kg/m ³ • 2,2 kPa • 75 N 7 cm Höhe: 80 kg/m ³ • 2,0 kPa • 75 N
Material Inkontinenzbezug • Brandschutznorm	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung • schwer entflammbar nach BS 7175 – Crib 5
Material Trikotbezug • Brandschutznorm	Polyester • schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I+II
Pflege	Kern
	Inkontinenzbezug
	Trikotbezug

• Ansicht

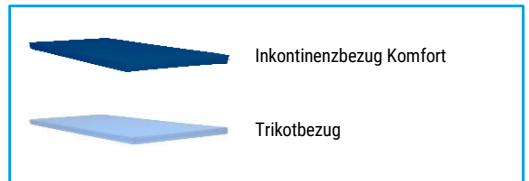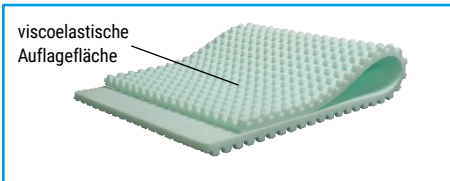

• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Das Produkt ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

