

Gebrauchsanweisung CareWave Abduktionskissen (HMV-Nr. 11.11.05.0015)

• Produktbeschreibung

Das CareWave Abduktionskissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung eingesetzt werden kann. Es ist ein keilförmiges Kissen, das hauptsächlich der Abduktion der Extremitäten, insbesondere im Knie- oder Schulterbereich oder zur Weichlagerung des Unterarms/Unterschenkels dient.

• Indikation

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren – vornehmlich im Bereich der unteren Extremitäten und der Ellenbogen – ist das CareWave Abduktionskissen indiziert.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CareWave Abduktionskissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperteile. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Die Mikro-polystyrol-Füllung passt sich gut an die jeweilige anatomische Körperkontur an.

Das Abduktionskissen dient der seitlichen Wegführung bzw. dem Abspreizen einer Extremität von der Körpermitte oder der Längsachse. In der hauptsächlichen Anwendung wird der spitz zulaufende Teil des Kissens zwischen den Oberschenkeln und die breite Basis zwischen den Knien des Patienten/Bewohners positioniert. Somit wird eine physiologische Stellung der unteren Extremitäten erreicht und ein Aneinanderliegen der Knieinnenseiten, beispielsweise bei Patienten mit Kontrakturen in diesem Bereich, wirksam verhindert. Es kann ebenfalls bei Kontrakturen im Bereich der Schulter Anwendung finden, wobei der schmale Teil des Kissens im Bereich der Achsel, zwischen Oberarm und seitlichem Brustkorb und die breitere Basis zwischen Ellbogen und Brustkorb platziert wird, um ein Anliegen des Ellenbogens am Thorax zu verhindern. Weiterhin ist es zur anhebenden Lagerung des Unterarmes, zur Weichlagerung des Ellenbogens oder zur Führung des Unterschenkels bei gleichzeitiger Freilagerung der Ferse geeignet.

• Anwendungsbereich | Funktion

Das CareWave Abduktionskissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett, im Rollstuhl bzw. jedem anderen Sitz- oder Liegemöbel. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Erfolgt die Verwendung des CareWave Abduktionskissens in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Kissens in die Seitengitter zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des Lagerungskissens besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Das Produkt ist somit flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung CareWave Abduktionskissen (HMV-Nr. 11.11.05.0015)

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Größe	Farbe	Gewicht	GTIN
NEG0888	23 x 12 x 18 cm	XS	grün	0,1 kg	4056538997752
NEG0615	30 x 15 x 20 cm	XL	blau	0,25 kg	4056538998797

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.11.05.0015
Füllung	100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
Pflege	

• Ansicht



• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

