

Gebrauchsanweisung CareWave FITLEG Beinpositionierung BASIS + MODUL

• Produktbeschreibung

Die CareWave FITLEG Beinpositionierungen sind Medizinprodukte, die als statische Positionierungshilfe der unteren Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung sowie zur effizienten Patientenpositionierung und Lagestabilisierung im Bett eingesetzt werden können. Die Basis ist ein keilförmiges Kissen mit halbkreisförmiger Aussparung auf der flachen Seite. Das Unterschenkelmodul mit seiner wellenförmigen Oberseite bietet optimalen Halt für die Lagerung der Unterschenkel.

• Indikation

Die CareWave FITLEG Beinpositionierungen dienen der Prophylaxe und Therapieunterstützung von Dekubitalgeschwüren und ermöglichen eine lagestabile Sitzposition im Patientenbett.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Die CareWave FITLEG Beinpositionierungen wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützen bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen.

Bei einem in Rückenlage befindlichen Patienten wird der Basiskeil so unter den Oberschenkeln platziert, dass die schmalen Stege des Lagerungskissens den Sakralbereich entlasten. Außerdem werden die Oberschenkel erhöht geführt und der Kniebereich durch die hohe Seite des Kissens unterfüttert. Bei beschriebener Anwendung bietet die Ausstattung des Kissens mit einer rutschfesten Unterseite eine sichere Patientenpositionierung, beispielsweise bei der Durchführung der Herzbettlagerung oder bei einfachen Oberkörperhochlagerungen und verhindert sicher ein Rutschen des Patienten in Richtung Fußende, bei gleichzeitiger Vermeidung des Auftretens von zusätzlichen Reib- und Scherkräften. Der Patient kann somit in einer Sitzposition im Bett stabilisiert werden.

In der Anwendungskombination mit dem Unterschenkelmodul wird die Positionierung der kompletten unteren Extremitäten erreicht, eine Abduktion gewährleistet und die vollständige Entlastung der Fersen durch Freilagerung ermöglicht. Durch die Weichlagerung der kompletten unteren Extremität wird das Risiko eines Dekubitus minimiert.

Basis und Modul können je nach Verwendungszweck auch einzeln oder in Kombination mit anderen CareWave-Lagerungshilfsmitteln eingesetzt werden.

• Anwendungsbereich

Die CareWave FITLEG Beinpositionierungen sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dienen der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Erfolgt die Verwendung der CareWave FITLEG Beinpositionierungen in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Kissens in die Seitengitter zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf den Lagerungskissen kontraindiziert.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Der Einsatz der CareWave FITLEG Beinpositionierungen ersetzt nicht die regelmäßigen Positionierungswechsel.

Material | Pflege und Reinigung

Der Kern der CareWave FITLEG-Lagerungskissen besteht aus elastischem Kaltschaum mit einem Raumgewicht von 35 kg/m³ und kann mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch den Anwender desinfiziert werden.

Der Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (37 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (63 %) und rutschfester Unterseite ist flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar und wischdesinfizierbar. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C gewaschen und desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.

Gebrauchsanweisung CareWave FITLEG Beinpositionierung BASIS + MODUL

Die Herstellung der CareWave FITLEG-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezeichnung	Farbe	Gewicht	GTIN
774376	58 x 55 x 12 cm	Basiskeil	blau	ca. 0,7 kg	4056538000193
774381	50 x 21 x 10,5 cm	Unterschenkelmodul	blau	ca. 0,4 kg	4056538000209
777161	58 x 55 x 12 cm + 50 x 21 x 10,5 cm	Set aus Keil + Modul	blau	ca. 1,1 kg	4056538000186

• Technische Daten

Material Raumgewicht Stauchhärte	Kaltschaum 35 kg/m ³ 4,0 kPa
Bezug	37 % Polyamidgewebe, 63 % Polyurethan
Pflege	

• Ansicht



• Hinweis

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

