

## Gebrauchsanweisung

### CareWave Fersenentlastungsgurt (HMV-Nr. 11.11.05.0012)

#### • Produktbeschreibung

Der CareWave Fersenentlastungsgurt ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe der unteren Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung eingesetzt werden kann. Der Fersenentlastungsgurt besteht aus einem mit Hohlfasern gepolsterten quaderförmigen Mittelteil, an dem zwei Gurtbänder mit Schnellverschluss befestigt sind, die das Lagerungskissen in seiner spezifischen Position fixieren.

#### • Indikation

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren im Bereich der Fersen ist der CareWave Fersenentlastungsgurt indiziert.

#### • Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Der CareWave Fersenentlastungsgurt wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip.

Er dient in der Rückenlage des Patienten/Bewohners der wirksamen Druckentlastung im Bereich der Fersen durch Freilagerung und wird mittels eines einstellbaren Gurtes direkt an der Matratze fixiert, was ein Verrutschen sicher verhindert. Die Hohlfaserfüllung des Kissens bewirkt die Weichlagerung des Bereiches oberhalb der Fersen und verteilt den Auflagedruck auf eine größere Fläche.

Der Fersenentlastungsgurt ist auch zur Unterstützung bei der Spitzfußprophylaxe anwendbar. Dazu wird der Gurt am Fußbrett des Bettes befestigt, um dort den Fuß zu polstern und sicher zu positionieren.

#### • Anwendungsbereich | Funktion

Der CareWave Fersenentlastungsgurt ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett bzw. Liegemöbel. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

#### • Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Erfolgt die Verwendung des CareWave Fersenentlastungsgurtes in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Fersenentlastungsgurtes in die Seitengitter zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert. In diesem Fall empfehlen wir die Anwendung unterhalb des Bettlakens. Schützen Sie den Fersenentlastungsgurt vor offenem Feuer (z. B. Zigarette, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

#### • Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des Fersenentlastungsgurtes besteht zu 100 % aus Hohlfaser und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingnäht. Daran schließen sich 2 Gurtbänder mit Schnellverschluss an. Das Produkt ist flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Lagerungshilfsmittel kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



## Gebrauchsanweisung

### CareWave Fersenentlastungsgurt (HMV-Nr. 11.11.05.0012)

#### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Farbe	Gewicht	GTIN
NEG0609	90 x 15 cm	blau	0,51 kg	4056538998773

#### • Technische Daten

HMV-Nr.	11.11.05.0012
Füllung	100 % Hohlfasern
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
Pflege	

#### • Ansicht



#### • Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.