

Gebrauchsanweisung CareWave Semi-Fowler-Kissen (HMV-Nr. 11.11.05.1015)

• Produktbeschreibung

Das CareWave Semi-Fowler-Kissen ist ein Medizinprodukt, das als statische Positionierungshilfe für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitusunterstützung eingesetzt werden kann. Es ist ein u-förmiges Kissen mit einem erhöhten Mittelteil, das multifunktional zur Lagerung verschiedener Körperbereiche Anwendung findet.

• Indikation

Zur Prophylaxe, Therapieunterstützung und Linderung von Dekubitalgeschwüren – vornehmlich im Sakralbereich bzw. bei allen in Rückenlage des Patienten dekubitusgefährdeten Körperteilen – ist das CareWave Semi-Fowler-Kissen indiziert.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CareWave Semi-Fowler-Kissen wirkt nach dem Weichlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützt bei der Durchführung spezifischer Lagerungsformen und der Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen. Durch das leichte Einsinken des Patienten/Bewohners in die Kissenstruktur verteilt sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche. Dies verbessert die Blutzirkulation der angrenzenden Gewebeareale. Die Mikropolystyrol-Füllung passt sich gut an die jeweilige anatomische Körperkontur an.

Die hauptsächlichliche Anwendung des CareWave Semi-Fowler-Kissens erfolgt in der Rückenlage des Patienten/Bewohners durch Unterfütterung von Kopf und Schultern, wobei der erhöhte Mittelteil des Kissens den Kopf sicher positioniert und die seitlichen Ausleger des u-förmigen Kissens die Schulterblätter wirksam druckentlasten. Diese komfortable Liegeposition verhindert eine Überstreckung des Kopfes und verbessert die Eigenwahrnehmung.

Des Weiteren kann die Positionierungshilfe in der Rückenlage des Anwenders durch Platzierung der Kissenbasis unterhalb der Knien und der seitlichen Ausleger unter den Oberschenkeln angewendet werden. Dabei gewährleistet der erhöhte Mittelteil eine Abduktion im Kniebereich. Aus der beschriebenen Anwendung heraus, kann das Kissen auch um 180° gedreht werden, so dass die Unterfütterung der Knie bestehen bleibt, die Unterschenkel geführt sowie die Fersen freigelagert werden.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht in der Anwendung des Kissens in einem Rollstuhl. Dabei wird die Kissenbasis mit der eigentlichen Auflagefläche auf den Oberschenkeln des Patienten/Bewohners platziert, so dass der erhöhte Mittelteil eine Abduktion der Knie erzeugt und sich eine gerade Auflagefläche zur Führung und Stabilisierung der Unterarme ergibt. Die Seitenarme des Kissens liegen am Rumpf des Anwenders an und unterstützen bei der Stabilisierung der Sitzposition.

• Anwendungsbereich | Funktion

Das CareWave Semi-Fowler-Kissen ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet und dient der Verbesserung der Positionierung in jeder Art von Bett, im Rollstuhl bzw. jeder anderen Art von Sitz- oder Liegemöbel. Es kann in Betten mit ebener oder verstellbarer Liegefläche eingesetzt werden.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Erfolgt die Verwendung des CareWave Semi-Fowler-Kissens in Betten mit Seitengittern, ist ein Einklemmen des Kissens in die Seitengitter zu verhindern, um einen eventuellen Funktionsverlust der Seitengitter und somit eine Patientengefährdung zu vermeiden.

Bei stark schwitzenden Patienten/Bewohnern mit Neigung zur Mazeration bzw. zur Unverträglichkeitsreaktion auf polyurethanbeschichtete Textilien ist die direkte Anwendung auf dem Lagerungskissen kontraindiziert. In diesem Fall empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Bezuges Lenzing FR®. Dieser Bezug mit integriertem Flammschutz vereint Inkontinenzschutz mit einer hautfreundlichen, textilen Oberfläche und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schützen Sie das Kissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Die Füllung des Lagerungskissens besteht zu 100 % aus Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung und ist in einen Bezug aus bi-elastischem Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %) fest eingenäht. Das Produkt ist somit flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv, abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette. Das Kissen kann im Fall einer Verunreinigung mit warmem Seifenwasser oder in der Waschmaschine mit handelsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Bitte beachten Sie, dass nach einem Waschgang mit einer verlängerten Trocknungszeit gerechnet werden muss; vor der Verwendung eines Wäschetrockners wird ausdrücklich gewarnt. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Der zusätzliche Bezug Lenzing FR® ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Mitteln bis 95 °C waschbar und bei niedriger Temperatur trocknergeeignet.

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz wird nicht empfohlen.



Gebrauchsanweisung CareWave Semi-Fowler-Kissen (HMV-Nr. 11.11.05.1015)

Die Herstellung der CareWave-Lagerungskissen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Größe	Farbe	Gewicht	GTIN
NEG0886	50 x 35 x 13 cm	XS	grün	0,51 kg	4056538997660
NEG0611	65 x 50 x 15 cm	XL	blau	1,13 kg	4056538998568


• Technische Daten

HMV-Nr.	11.11.05.1015
Füllung	100 % Polystyrolkugeln mit kleiner Granulierung
Außenhülle	bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)
Pflege	

• Zubehör

Name	Bezug Lenzing FR® für NEG0611
Artikelnummer	NEG0632HLEN
Größe	65 x 50 x 15 cm
GTIN	4056538002302
Zusammensetzung	außen: 70 % Lyocell, 30 % Viscose innen: 100 % Polyurethan
Schwerentflammbarkeit	dauerhaft schwer entflammbar
Pflege	

• Ansicht

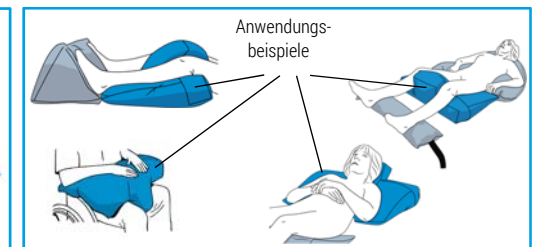

• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen, aber gegebenenfalls das Lagerungsintervall verlängern bzw. die korrekte Lagerung und Positionierung erst ermöglichen.

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.