

Gebrauchsanweisung TERRAPUR Standardpflegebettmatratze

• Produktbeschreibung

Die TERRAPUR ist eine Standardpflegebettmatratze aus einem einteiligen elastischen PU-Schaumstoffkern RG 35, der keinerlei Längs- und Quereinschnitte aufweist. Auf Grund des wirksamen Zusammenspiels von Raumgewicht, Stauch- und Eindruckhärte wird ein angenehmer Liegekomfort erreicht und ein Durchliegen von Patienten (bis 125 kg) verhindert. Der Polyurethanschaum ist atmungsaktiv. Er wird FCKW-frei geschäumt und nach Oeko-Text Standard 100 hergestellt und geprüft. Die Matratze ist für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet.

• Indikation

Die Pflegebettmatratze TERRAPUR ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund ihrer Krankheit, Behinderung oder aufgrund des Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist. Sie ist nicht zu Therapie Zwecken geeignet und darf nicht für behandelnde Maßnahmen eingesetzt werden.

• Anwendungsbereich

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der TERRAPUR verhindern. Die Pflegebettmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der TERRAPUR dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 125 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Für behandelnde Maßnahmen wie Dekubitustherapie darf sie nicht eingesetzt werden.

Die TERRAPUR ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.

Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.

Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z.B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus Polyurethanschaum mit einer ununterbrochenen Liegefläche und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Der Bezug der Matratze ist entweder ein blauer, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammbarer Trikotbezug oder ein weißer Trikotbezug. Die Bezüge sind durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und können im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C (blau) oder 40 °C (weiß) gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Wird der zusätzlich erhältliche PU-Bezug eingesetzt, sollte die Wisch- oder Sprühdeseinfektion ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

• Lagerung

Die entpackte TERRAPUR darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.

Gebrauchsanweisung TERRAPUR Standardpflegebettmatratze

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M17997	200 x 90 x 10 cm	Trikot DIN blau	6,6 kg	4056538991385
M17982	190 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,5 kg	4056538994560
M17610	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,8 kg	4056538999138
M17907	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,6 kg	4056538999169
M25543	190 x 90 x 12 cm	Trikot weiß	7,4 kg	4056538000827
M21537	200 x 90 x 10 cm	Trikot weiß	6,5 kg	4056538999329
M21912	200 x 90 x 12 cm	Trikot weiß	7,7 kg	4056538998971
M21913	200 x 100 x 12 cm	Trikot weiß	8,5 kg	4056538994751

• Technische Daten

Patientengewicht	40–125 kg
Raumgewicht Stauchhärte	35 kg/m³ 4,0 kPa
Trikotbezug blau Brandschutznorm	100 % Baumwolle DIN EN 597 Teil I + II
Trikotbezug weiß Brandschutznorm	100 % Polyester –
Pflege	Kern
	Bezug blau
	Bezug weiß

• Ansicht



• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

