

Gebrauchsanweisung SHP-CUBE FLEX Würfelsitzkissen Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Indikationen und Einsatzbereiche

Das Antidekubitus-Rollstuhl- und Sitzkissen SHP-CUBE FLEX Würfelskissen zur Freilagerung ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „mittel“) als auch für die Dekubitusunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch den Einsatz von Kaltschaum ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Das SHP-CUBE FLEX Würfelskissen ist für schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Das SHP-CUBE FLEX Würfelskissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen nicht einzusetzen.

Patienten mit einer Schaumstoffallergie dürfen nicht auf dem Sitzkissen gelagert werden.

Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!

Anwendungsbereich

Das Antidekubitus-Sitzkissen SHP-CUBE FLEX Würfelskissen ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitusgeschwüren bestimmt ist. Es ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Das SHP-CUBE FLEX Würfelskissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Es ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls oder einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können. Auf dem SHP-CUBE FLEX Würfelskissen dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 110 kg gelagert werden. Die ideale Einsatztemperatur liegt zwischen 10 °C und 40 °C. Das SHP-CUBE FLEX Sitzkissen ist standardmäßig mit einem anthrazigrauen Inkontinenzbezug ausgestattet.

Bitte beachten Sie.

- dass der Einsatz des SHP-CUBE FLEX Würfelskissens nicht die regelmäßigen notwendigen Positionierungswechsel des Patienten vollständig ersetzt.
- dass bei der Positionierung des Patienten ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden zu vermeiden ist.
- dass der Patient bei Anwendung des SHP-CUBE FLEX Würfelskissens über Eigenbewegungen verfügt.

Das SHP-CUBE FLEX Würfelskissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

Funktionsbeschreibung

Das SHP-CUBE FLEX Würfelskissen wird aus einem hochelastischen Polyurethan-Kaltschaum gefertigt. Die Sitzfläche besteht aus einzelnen, voneinander unabhängigen entfernbaren Schaumstoffwürfeln. Das ermöglicht eine punktuelle und flexible Freilagerung gefährdeter oder erkrankter Körperstellen. Die Würfelstruktur macht das Kissen sehr atmungsaktiv, zudem wird die Oberfläche deutlich flexibler und kann sich so optimal den Körperkonturen anpassen. Das dient der Vorbeugung von Druckgeschwüren (Rötungen und Hautschädigungen durch fehlende Druckverteilung). Das Würfelsitzkissen wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet. Durch die Freilagerung ebenso wie durch die Eigenbewegungen bzw. die Gewichtsverlagerungen des sitzenden Patienten erfolgt eine wechselseitige Druckreduzierung. Somit wird die Durchblutung in den jeweils weniger belasteten Gewebearealen abwechselnd verbessert und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus verringert. Durch den abnehmbaren Inkontinenzbezug wird das Sitzkissen vor Verunreinigungen geschützt. Eine Trageschleife an der Einstiegsseite erleichtert die Handhabung und den Transport. Der Sitzkissenbezug ist abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Waschmitteln bei max. 90 °C gewaschen werden. Das SHP-CUBE FLEX ist wiedereinsatzfähig. Vor dem Wiedereinsatz (z. B. Patientenwechsel) sind das Sitzkissen und der Sitzkissenbezug hygienisch aufzubereiten sowie anhand der Checkliste für den Wiedereinsatz zu prüfen.



Gebrauchsanweisung SHP-CUBE FLEX Würfelsitzkissen Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Anwendung

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetriebV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko sowie vorhandene Dekubitusgeschwüre beurteilen zu können.

- Überprüfen Sie das Antidekubitus-Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des SHP-CUBE FLEX Würfelskissens geeignet ist. Beachten Sie dabei die Anforderungskriterien der Sitzgelegenheit im Kapitel Anwendungsbereich.
- Öffnen Sie den Deckel der Kartonverpackung und entnehmen Sie das SHP-CUBE FLEX Würfelskissen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
- Der Bezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen.
- Legen Sie das SHP-CUBE FLEX Sitzkissen mit der Reißverschlusskante nach unten auf die Sitzfläche der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl usw.). Die Trageschleife muss zum Einstieg zeigen.

Pflege und Reinigung | Wiedereinsatz

Die Herstellung des SHP-CUBE FLEX Würfelskissens unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht
K19601	43 x 43 x 8 cm	0,7 kg

Technische Daten

Patientengewicht	40–110 kg
Material Raumgewicht Stauchhärte	Grundplatte/Stege: Polyurethan-Kaltschaum 35 kg/m³ 4,5 kPa
	Würfel: Polyurethan-Kaltschaum 45 kg/m³ 5,5 kPa
Bezug	Inkontinenzbezug: Komfort 205 g/m², anthrazit

Ansicht



Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigaretteglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

