

Gebrauchsanweisung CUBE GEL (HMV-Nr. 11.39.02.1007) Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Produktbeschreibung

Das Antidekubitus-Sitzkissen CUBE GEL ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalzerationen/Druckgeschwüren im Sakralbereich bestimmt ist. Das Kissen mit würfelförmiger, strukturierter Sitzfläche besteht aus elastischem Polyetherschaumstoff und hat eine Freilagerungskontur mit Geltouch-Auflage.

Indikation

Das Sitzkissen ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Es dient der Prophylaxe und Therapieunterstützung (bis Kategorie IV nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen zum effizienten Dekubitusmanagement. Das CUBE GEL Sitzkissen ist auch bei schmerzempfindlichen Patienten einsetzbar.

Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Das CUBE GEL wirkt nach dem Weich- und dem Freilagerungsprinzip. Die Kombination aus würfelförmiger Sitzfläche und Freilagerungskontur zeichnet sich durch eine hervorragende Punktelastizität aus und sorgt durch die offenzellige Porenstruktur für eine hohe Luftdurchlässigkeit bzw. Atmungsaktivität, die ein angenehmes Sitzklima schafft. Die unterschiedlich hohen würfelförmigen Schaumstrukturen ermöglichen eine stabile Sitzposition und eine optimierte Führung der Oberschenkel. Weiterhin ist eine konturgenaue Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten des Patienten und eine hohe statische Druckentlastung – insbesondere im Bereich der Sitzbeinhöcker – gegeben. Die mit Geltouch-Schaumstoff ausgefüllte Freilagerungskontur im Bereich der Sitzbeinhöcker bewirkt eine fast vollständige Freilagerung, reduziert den Auflagedruck, ermöglicht eine verbesserte Durchblutung der Haut und des Unterhautfettgewebes.

- Kontrollieren Sie das Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des Sitzkissens CUBE GEL geeignet ist.
- Der Sitzkissenbezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen.
- Legen Sie das CUBE GEL Sitzkissen mit der rutschfesten Unterseite auf die Sitzfläche, so dass die schwarze Seite die Oberseite und Sitzfläche darstellt. Die Trageschleife muss zum Einstieg zeigen.

Anwendungsbereich

Das Antidekubitus-Sitzkissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Es ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls bzw. einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können.

Das CUBE GEL ist je nach Kissengröße für Patienten mit einem Gewicht von 20 kg bis maximal 225 kg geeignet.

Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und bestehende Risiken beurteilen zu können.

Das CUBE GEL Sitzkissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen oder einer Schaumstoffallergie nicht einzusetzen!

Bei Patienten mit schweren Sensibilitätsstörungen oder anderen Erkrankungen im Aufsitzbereich, ist das Kissen nicht einzusetzen; ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden ist zu vermeiden.

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Material | Pflege und Reinigung

Der Kissenkern besteht aus einem elastischen Polyetherschaumstoff sowie einer Geltouch-Auflage und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert sowie mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 75 °C autoklaviert werden.

Der Bezug des Sitzkissens ist standardmäßig ein blau-schwarzer Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite, die einen festen Halt des Kissens auf der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl u. a.) ermöglicht. Der Sitzkissenbezug ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.



Gebrauchsanweisung CUBE GEL (HMV-Nr. 11.39.02.1007) Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Das Produkt ist wartungsfrei. Der Wiedereinsatz des Kissens wird nicht empfohlen.

Die Herstellung des CUBE GEL Sitzkissens unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

Maße

| Artikelnummer | Abmessungen (B x T x H) | Gewicht | zulässiges | GTIN |
|---------------|-------------------------|---------|------------------------|---------------|
| K31085 | 38 x 38 x 8 cm | 0,60 kg | 20–140 kg ^h | 4056538002531 |
| K31136 | 38 x 42 x 8 cm | 0,60 kg | 20–140 kg | 4056538002814 |
| K31086 | 40 x 40 x 8 cm | 0,60 kg | 20–140 kg | 4056538002548 |
| K31137 | 40 x 42 x 8 cm | 0,60 kg | 20–140 kg | 4056538002821 |
| K31090 | 42 x 42 x 8 cm | 0,65 kg | 20–140 kg | 4056538002555 |
| K31103 | 42 x 45 x 8 cm | 0,70 kg | 20–140 kg | 4056538002593 |
| K31094 | 45 x 42 x 8 cm | 0,70 kg | 20–140 kg | 4056538002678 |
| K31104 | 45 x 45 x 8 cm | 0,75 kg | 20–140 kg | 4056538002586 |
| K31095 | 48 x 43 x 8 cm | 0,80 kg | 20–140 kg | 4056538002661 |
| K31096 | 48 x 45 x 8 cm | 0,80 kg | 20–140 kg | 4056538002654 |
| K31097 | 51 x 43 x 8 cm | 0,90 kg | 40–175 kg | 4056538002647 |
| K31098 | 51 x 45 x 8 cm | 0,90 kg | 40–175 kg | 4056538002630 |
| K31105 | 51 x 51 x 8 cm | 1,00 kg | 40–175 kg | 4056538002579 |
| K31100 | 55 x 43 x 8 cm | 1,10 kg | 60–225 kg | 4056538002623 |
| K31101 | 55 x 45 x 8 cm | 1,10 kg | 60–225 kg | 4056538002616 |

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Material Raumgewicht Stauchhärte | Kissen Freilagerungskontur | elastischer Polyetherschaumstoff 50 kg/m ³ 6,5 kPa Geltouch-Schaumstoff 50 kg/m ³ 2,5 kPa |
| Bezug | Pharmatex-Gewebe: | 65 % Polyurethan, 35 % Polyester Antirutsch-Unterseite: 57 % Polyurethan, 43 % Polyester |
| Brandschutznorm | DIN EN 597 Teil I + II | |
| Pflege | Kern | |
| | Bezug | |

Ansicht

CUBE GEL Sitzkissen mit Inkontinenzbezug



Hinweis

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.