

Gebrauchsanweisung DEKUCARE VISCO (HMV-Nr. 11.29.05.0041) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Produktbeschreibung

Die Weichlagerungsmatratze DEKUCARE VISCO ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalzerationen bestimmt ist. Die zweischichtig aufgebaute Matratze besteht aus einem Schaumstoffkern mit würfelförmiger Struktur und einer durchgehenden viscoelastischen Liegefläche. Die Schaumstoffteile sind mit einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf und einem Polyurethanvollschutzbezug umgeben oder mit einem Trikotbezug umhüllt.

• Indikation

Die Matratze DEKUCARE VISCO dient der Prophylaxe (gemäß Braden-Skala bis Risikostufe „hoch“) und Therapieunterstützung (bis Kategorie III nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen zum effizienten Dekubitusmanagement. Sie ist für schmerzempfindliche und kachektische Patienten/Bewohner geeignet.

• Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung

Die DEKUCARE VISCO wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an die anatomischen Körperkonturen des Patienten, wobei sich der Auflagedruck auf eine wesentlich größere Fläche verteilt. Dadurch verbessert sich die Durchblutung der Gewebeareale und das Risiko eines Dekubitus wird minimiert. Die Kombination aus Weichlagerungsoberfläche und Schaumkern erzeugt einen hohen Liegekomfort und eine statische Druckentlastung.

• Anwendungsbereich

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKUCARE VISCO verhindern. Die Weichlagerungsmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der DEKUCARE VISCO dürfen Patienten/Bewohner mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko sowie vorhandene Dekubitalzurationen beurteilen zu können. Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nur bei den Artikelnummern M17483 und M17821 im Lieferumfang enthalten. Die DEKUCARE VISCO ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen! Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen. Der Patient/Bewohner darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus elastischem Polyurethanschaum sowie einer Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränktem Tuch vom Anwender wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 75 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist entweder ein blauer Vollschutzbezug SHP-PROTECT (atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig und schwer entflammbar) oder ein blauer Trikotbezug (atmungsaktiv, schwer entflammbar). Die Bezüge sind durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und können im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei max. 95 °C (SHP-PROTECT) oder 60 °C (Trikot) gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch das Robert Koch-Institut (RKI) oder den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die DEKUCARE VISCO ist eine wiedereinsetzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreibV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.



Gebrauchsanweisung DEKUCARE VISCO (HMV-Nr. 11.29.05.0041) Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die Herstellung der Matratzen unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

• Lagerung

Die DEKUCARE VISCO darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M17483	200 x 90 x 14 cm	Inkontinenzbezug SHP-	12,3 kg	4056538991323
M17732	200 x 90 x 14 cm	Trikotbezug	11,5 kg	4056538998575
M17821	200 x 100 x 14 cm	Inkontinenzbezug SHP-	13,6 kg	4056538998537
M17902	200 x 100 x 14 cm	Trikotbezug	12,8 kg	4056538998544

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.29.05.0041			
Patientengewicht	40–140 kg			
Raumgewicht Stauchhärte Eindruckhärte	Würfeln	45 kg/m³ 3,2 kPa 120 N		
	Deckplatte	47 kg/m³ 1,2 kPa 60 N		
Inkontinenzbezug Brandschutznorm	43 % Polyester, 57 % Polyurethan schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I			
Trikotbezug blau Brandschutznorm	100 % Polyester schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II			
HMV-Druckentlastungsklasse	bei 80 kg:	H		
	bei 130 kg:	H		
Pflege	Kern			
	Inkontinenzbezug			
	Trikotbezug			
Garantie	5 Jahre bei Bildung von Liegemulden			

• Ansicht

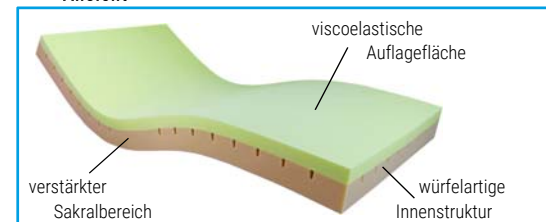

• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.