

## Gebrauchsanweisung SHP-DEKUCARE WM 55 D

### Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### Indikationen und Einsatzbereiche

Die Antidekubitusmatratze SHP-DEKUCARE WM 55 D ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch zur Dekubitusunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch den Einsatz von speziellen Materialien ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-DEKUCARE WM 55 D ist für schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

#### Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-DEKUCARE WM 55 D ist für Patienten mit Schaumstoffallergien nicht geeignet. Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden! Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbegrenzungen für diese Matratze.

#### Anwendungsbereich

Die SHP-DEKUCARE WM 55 D ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-DEKUCARE WM 55 D verhindern. Die Antidekubitusmatratze SHP-DEKUCARE WM 55 D kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-DEKUCARE WM 55 D dürfen Patienten mit einem Gewicht von 50 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-DEKUCARE WM 55 D ist standardmäßig mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammablen Inkontinenzbezug AG-PROTECT ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-DEKUCARE WM 55 D ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechenden Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

#### Funktionsbeschreibung

Die SHP-DEKUCARE WM 55 D ist eine Schaumstoffmatratze mit ununterbrochener, hochelastischer Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-DEKUCARE WM 55 D wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitusunterstützung kann sie bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet werden. Sie besteht aus einem Schaumstoffkern und einem hochelastischen Schaumstoffdeckel. Der PU-Schaumstoffkern ist mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten durchzogen. Die dadurch entstehende würfelförmige Innenstruktur passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten an. Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Der Kern (200 x 90 x 12 cm), bestehend aus 180 würfelförmigen Formen mit einer Auflagefläche von 9 x 9 cm und einer Höhe von 5 cm, sorgt für eine optimale Druckentlastung. Die Auflagefläche besteht aus einem weichen, nicht strukturierten, hochelastischen Schaumstoff. Für eine bessere Mobilisierung ist die Matratze mit einer Randzone ausgerüstet. In Kombination mit der Innenstruktur verteilen sich die entstehenden Auflagedrucke auf eine größere Fläche und werden reduziert. Exponierte Körperbereiche, wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen, werden besonders stark entlastet. Auf Grund der zwei Schaumstoffschichten mit unterschiedlichen Raumgewichten, Stauch- und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 140 kg) verhindert. Die SHP-DEKUCARE WM 55 D wurde für ein Patientengewicht von 50–140 kg konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammablen Inkontinenzbezug AG-PROTECT ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 90 °C waschbar.

Die SHP-DEKUCARE WM 55 D ist eine wiedereinsetzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



## Gebrauchsanweisung SHP-DEKUCARE WM 55 D

### Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### Lagerung

Die entpackte SHP-DEKUCARE WM 55 D darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


#### Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17742	200 x 90 x 12 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	11,8 kg
M17904	200 x 100 x 12 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	13,1 kg

#### Technische Daten

Patientengewicht   BMI	50–140 kg   17–35
Druckentlastung	bei 80 kg: Klasse H; bei 120 kg: Klasse H
Raumgewicht   Stauchhärte	Rand: 50 kg/m <sup>3</sup>   8,0 kPa Würfeln: 50 kg/m <sup>3</sup>   5,0 kPa Deckplatte: 50 kg/m <sup>3</sup>   3,0 kPa
Bezug	Inkontinenzbezug AG-PROTECT, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

#### Ansicht

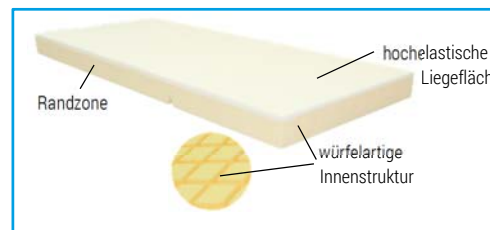

#### Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeentwicklung. Es besteht Brandgefahr!

