

## Gebrauchsanweisung SHP-DEKULAST XXL

### Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### • Indikationen und Einsatzbereiche

Die Antidekubitus-Schwerlastmatratze SHP-DEKULAST XXL ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch zur Dekubitusunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch die viscoelastische Oberfläche ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-DEKULAST XXL ist für extrem adipöse und schmerzempfindliche Patienten bis 350 kg geeignet.

#### • Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-DEKULAST XXL ist für Patienten mit Schaumstoffallergien nicht geeignet.  
Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!  
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbegrenzungen für diese Matratze.

#### • Anwendungsbereich

Die SHP-DEKULAST XXL ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar – unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit. Sollte diese überschritten werden, ist ein geeignetes Schwerlastbett einzusetzen. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-DEKULAST XXL verhindern. Die Schwerlastmatratze SHP-DEKULAST XXL kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, die für das entsprechende Patientengewicht zugelassen sind. Die optimale Wirkung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Antidekubitusmatratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-DEKULAST XXL dürfen Patienten mit einem Gewicht von 180 kg bis maximal 350 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-DEKULAST XXL ist standardmäßig mit einem blauen, nach CRIB 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-DEKULAST XXL ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Schwerlastmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

#### • Funktionsbeschreibung

Die SHP-DEKULAST XXL ist eine Schaumstoffmatratze mit einem vierschichtigen Aufbau und ununterbrochener viscoelastischer Liegefläche. Sie dient der Minderung von Scherkräften und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-DEKULAST XXL wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitusunterstützung kann sie bis einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet werden. Sie besteht aus einem sehr festen durchgehenden Schaumteil aus HR-Schaum, einer Stabilisierungsschicht (Rückstellschicht) aus einem hochelastischen Kaltschaum, einer weiteren Stabilisierungsschicht und der Liegefläche – beide aus unterschiedlich festen viscoelastischen Schaumstoffen, die sich temperatur- und druckabhängig optimal den Körperkonturen anpassen – sowie einer Randzonenverstärkung. Dieser vierschichtige Aufbau mit zwei gewichtsausgleichenden Stabilisierungsschichten wurde speziell für die Behandlung von adipösen Patienten bis 350 kg entwickelt. Der Auflagedruck kann sich so auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und das Risiko eines Dekubitus minimiert wird. Auf Grund der vier Schaumstoffschichten mit unterschiedlichen Raumgewichten, Stauch- und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von adipösen Patienten (bis 350 kg) verhindert. Die Randzonenverstärkung aus festem Schaum verhindert das Rausrollen bzw. -rutschen des Patienten und ermöglicht eine leichtere Mobilisierung. Die Schwerlastmatratze wurde für ein Patientengewicht von 180–350 kg konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 90 °C waschbar. Die SHP-DEKULAST XXL ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



## Gebrauchsanweisung SHP-DEKULAST XXL

### Schwerlastmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### • Lagerung

Die entpackte SHP-DEKULAST XXL darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


#### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17690	200 x 90 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	18,2 kg
M17684	200 x 100 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	20,0 kg
M17685	220 x 100 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	21,9 kg
M17686	200 x 120 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	23,8 kg
M17683	220 x 120 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	26,0 kg
M17687	200 x 140 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	27,7 kg
M17688	220 x 140 x 18 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	30,2 kg

#### • Technische Daten

Patientengewicht	180–350 kg
Raumgewicht   Stauchhärte   Eindruckhärte	Grundplatte: 45 kg/m <sup>3</sup>   5,5 kPa   230 N Rückstellplatte: 50 kg/m <sup>3</sup>   3,8 kPa   150 N Mittelplatte: 50 kg/m <sup>3</sup>   3,0 kPa   120 N Deckplatte: 50 kg/m <sup>3</sup>   2,2 kPa   90 N Randzone: 65 kg/m <sup>3</sup>   11,0 kPa   490 N
Bezug	Inkontinenzbezug KOMFORT, schwer entflammbar nach CRIB 5
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

#### • Ansicht

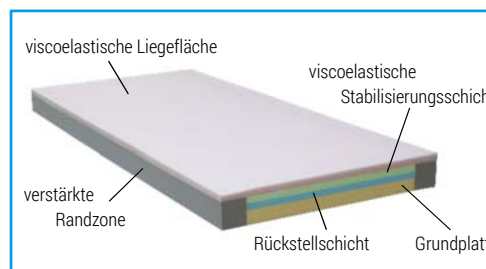

#### • Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

