

## Gebrauchsanweisung SHP-DEKUSOFT VISCO

### Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### Indikationen und Einsatzbereiche

Die Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze SHP-DEKUSOFT VISCO ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „hoch“) als auch zur Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie III nach EPUAP) geeignet. Durch die Weichlagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Die SHP-DEKUSOFT VISCO ist für kachektische und schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

#### Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-DEKUSOFT VISCO ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.  
Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!  
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

#### Anwendungsbereich

Die SHP-DEKUSOFT VISCO ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-DEKUSOFT VISCO verhindern. Die Weichlagerungsmatratze SHP-DEKUSOFT VISCO kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-DEKUSOFT VISCO dürfen Patienten mit einem Gewicht von 35 kg bis maximal 120 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-DEKUSOFT VISCO ist standardmäßig mit einem blauen, nach CRIB 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-DEKUSOFT VISCO ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

#### Funktionsbeschreibung

Die SHP-DEKUSOFT VISCO ist eine Schaumstoffmatratze mit würfelförmiger Innenstruktur und ununterbrochener Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die SHP-DEKUSOFT VISCO wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung am ganzen Körper eingesetzt. Bei der Dekubitustherapie kann sie bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) verwendet werden. Sie besteht aus einem Schaumstoffkern und einem viscoelastischen Schaumstoffdeckel. Der PU-Schaumstoffkern ist mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten durchzogen. Die dadurch entstehende würfelförmige Innenstruktur passt sich optimal den Körperkonturen des Patienten an. Der Auflagedruck kann sich auf eine wesentlich größere Fläche verteilen, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Der Kern (200 x 90 x 16 cm) besteht aus 512 würfelförmigen Formen mit einer Auflagefläche von 4 x 4 cm und einer Höhe von 5 cm und sorgt für eine optimale Druckentlastung. Die Auflagefläche besteht aus einem weichen, nicht strukturierten, viscoelastischen Schaumstoff. Für eine bessere Mobilisierung ist die Matratze mit einer wannenförmigen Randzone ausgerüstet. In Kombination mit der Innenstruktur verteilen sich die entstehenden Auflagedrucke auf eine größere Fläche und werden reduziert. Exponierte Körperbereiche, wie z. B. Fersen, Becken und Ellenbogen, werden besonders stark entlastet. Auf Grund der drei Schaumstoffschichten mit unterschiedlichen Raumgewichten, Stauch- und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 120 kg) verhindert. Die Antidekubitusmatratze wurde für ein Patientengewicht von 35–120 kg konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Inkontinenzbezug KOMFORT ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 90 °C waschbar.

Die SHP-DEKUSOFT VISCO ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



## Gebrauchsanweisung SHP-DEKUSOFT VISCO

### Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### Lagerung

Die entpackte SHP-DEKUSOFT VISCO darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


#### Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17734	200 x 90 x 16 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	14,0 kg
M17818	200 x 100 x 16 cm	Inkontinenzbezug KOMFORT blau	15,4 kg

#### Technische Daten

Patientengewicht   BMI	35–120 kg   15–35
Druckentlastung	bei 80 kg: Klasse H; bei 130 kg: Klasse H
Raumgewicht   Stauchhärte	Rand: 35 kg/m <sup>3</sup>   5,5 kPa Würfelkern: 45 kg/m <sup>3</sup>   3,2 kPa Deckplatte: 47 kg/m <sup>3</sup>   1,2 kPa
Bezug	Inkontinenzbezug KOMFORT, schwer entflammbar nach CRIB 5
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

#### Ansicht

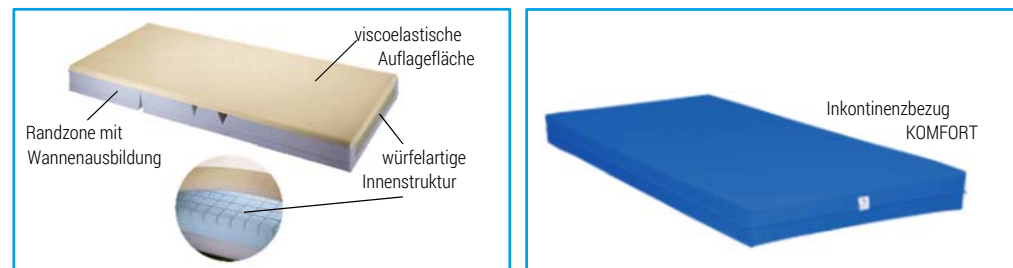

#### Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

