

## Gebrauchsanweisung SHP-FOAMLUX

### Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

#### • Indikationen und Einsatzbereiche

Das Antidekubitus-Rollstuhl- und Sitzkissen SHP-FOAMLUX ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „mittel“) als auch für die Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Das SHP-FOAMLUX Sitzkissen ist für schmerzempfindliche Patienten gut geeignet.

#### • Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Das SHP-FOAMLUX Sitzkissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen nicht einzusetzen. Patienten mit einer Schaumstoffallergie dürfen nicht auf dem Sitzkissen gelagert werden. Bei vorliegender Inkontinenz sollte der mitgelieferte Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden! Achten Sie unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Kissen.

#### • Anwendungsbereich

Das Antidekubitus-Sitzkissen SHP-FOAMLUX ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitusgeschwüren bestimmt ist. Es ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Das SHP-FOAMLUX Sitzkissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich, für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Es ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls oder einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können. Auf dem SHP-FOAMLUX Sitzkissen dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Das SHP-FOAMLUX Sitzkissen ist standardmäßig mit einem anthrazitgrauen PU-Bezug ausgestattet.

#### Bitte beachten Sie.

- dass der Einsatz des SHP-FOAMLUX Sitzkissens nicht die regelmäßigen notwendigen Positionierungswechsel des Patienten vollständig ersetzt.
- dass bei der Positionierung des Patienten ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden zu vermeiden ist.
- dass der Patient bei Anwendung des SHP-FOAMLUX Sitzkissens über Eigenbewegungen verfügt.

Das SHP-FOAMLUX Sitzkissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

#### • Funktionsbeschreibung

Das SHP-FOAMLUX Sitzkissen wird aus PU-Schaumstoff gefertigt, passt sich optimal den Körperkonturen an und dient dadurch der Vorbeugung von Druckgeschwüren (Rötungen und Hautschädigungen durch fehlende Druckverteilung). Es wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet. Durch die Eigenbewegungen bzw. die Gewichtsverlagerungen des sitzenden Patienten erfolgt eine wechselseitige Druckreduzierung. Somit wird die Durchblutung in den jeweils weniger belasteten Geweberealen abwechselnd verbessert und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus verringert. Durch den abnehmbaren PU-Bezug wird das Sitzkissen vor Verunreinigungen geschützt. Die Unterseite des Bezuges hat eine rutschhemmende Beschichtung, die einen festeren Halt des Sitzkissens auf der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl u. a.) ermöglicht. Eine Trageschleife an der Einstiegsseite erleichtert die Handhabung und den Transport des Sitzkissens. Der Sitzkissenbezug ist abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Waschmitteln bei max. 60 °C gewaschen werden. Das Sitzkissen SHP-FOAMLUX ist wiedereinsatzfähig. Vor dem Wiedereinsatz (z. B. Patientenwechsel) sind das Sitzkissen und der Sitzkissenbezug hygienisch aufzubereiten sowie anhand der Checkliste für den Wiedereinsatz zu prüfen.

#### • Anwendung

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetriebV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen, und das bestehende Dekubitusrisiko sowie vorhandene Dekubitusgeschwüre beurteilen zu können.

- Überprüfen Sie das Antidekubitus-Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des SHP-FOAMLUX Sitzkissens geeignet ist. Beachten Sie dabei die Anforderungskriterien der Sitzgelegenheit im Kapitel Anwendungsbereich.
- Öffnen Sie den Deckel der Kartonverpackung und entnehmen Sie das SHP-FOAMLUX Sitzkissen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.



## Gebrauchsanweisung SHP-FOAMLUX

### Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

- Der PU-Sitzkissenbezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen. Legen Sie das SHP-FOAMLUX Sitzkissen mit der schwarzen, rutschhemmenden Unterseite auf die Sitzfläche der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl usw.), so dass die vorgeformte Seite die Oberseite und Sitzfläche darstellt. Die Trageschleife muss zum Einstieg zeigen.

#### • Pflege und Reinigung | Wiedereinsatz

Die Herstellung des SHP-FOAMLUX Sitzkissens unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

#### • Maße

Artikelnummer mit Inkontinenz-Bezug	Abmessungen	Gewicht	zulässiges Patientengewicht
K25644	38 x 38 x 8 cm	0,7 kg	40–140 kg
K25645	40 x 40 x 8 cm	0,8 kg	40–140 kg
K25646	42 x 42 x 8 cm	0,8 kg	40–140 kg
K25647	44 x 43 x 8 cm	0,9 kg	40–140 kg
K25648	45 x 42 x 8 cm	0,9 kg	40–140 kg
K25649	48 x 43 x 8 cm	1,0 kg	40–140 kg
K25650	48 x 45 x 8 cm	1,0 kg	40–140 kg
K25651	51 x 43 x 8 cm	1,1 kg	40–175 kg
K25652	51 x 45 x 8 cm	1,1 kg	40–175 kg
K25653	55 x 43 x 8 cm	1,2 kg	40–225 kg
K25654	55 x 45 x 8 cm	1,2 kg	40–225 kg

#### • Technische Daten

Material   Raumgewicht   Stauchhärte	Formschaum   85 kg/m <sup>3</sup>   3,2 kPa
Bezug	Unterseite: antirutsch PU, restliche Flächen: PU + PA Inkontinenzbezug: Komfort 205 g/m <sup>2</sup> , anthrazit

#### • Ansicht



#### • Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

