

Gebrauchsanweisung SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Indikationen und Einsatzbereiche

Das Antidekubitus-Rollstuhl- und Sitzkissen SHP-PRIMAFOAM 6 ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „mittel“) als auch für die Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Durch den Einsatz von einem Schaum mit Formgedächtnis ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine hohe statische Druckentlastung möglich. Das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen ist für schmerzempfindliche Patienten gut geeignet.

• Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen nicht einzusetzen. Patienten mit einer Schaumstoffallergie dürfen nicht auf dem Sitzkissen gelagert werden. Sollte ein Patient schwitzen und eine Hautmazeration begünstigt werden, muss durch den behandelnden Arzt die Anwendung des SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissens individuell entschieden werden.

• Anwendungsbereich

Das Antidekubitus-Sitzkissen SHP-PRIMAFOAM 6 ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitusgeschwüren bestimmt ist. Es ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich, für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Es ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls oder einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können. Auf dem SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 120 kg gelagert werden. Das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen ist standardmäßig mit einem anthrazitgrauen PU-Bezug ausgestattet.

Bitte beachten Sie,

- dass der Einsatz des SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissens nicht die regelmäßigen notwendigen Positionierungswechsel des Patienten vollständig ersetzt.
- dass bei der Positionierung des Patienten ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden zu vermeiden ist.
- dass der Patient bei Anwendung des Sitzkissens SHP-PRIMAFOAM 6 über Eigenbewegungen verfügt.

Das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

• Funktionsbeschreibung

Das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen wird aus viscoelastischem Schaumstoff mit Formgedächtnis gefertigt, passt sich optimal den Körperkonturen an und dient dadurch der Vorbeugung von Druckgeschwüren (Rötungen und Hautschädigungen durch fehlende Druckverteilung). Es wird zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung einschließlich Kategorie II (nach EPUAP) verwendet. Durch die Eigenbewegungen bzw. die Gewichtsverlagerungen des sitzenden Patienten erfolgt eine wechselseitige Druckreduzierung. Somit wird die Durchblutung in den jeweils weniger belasteten Geweberealen abwechselnd verbessert und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus verringert. Das Sitzkissen SHP-PRIMAFOAM 6 ist für ein zulässiges Patientengewicht von 40–120 kg bestimmt. Durch den abnehmbaren PU-Bezug wird das Sitzkissen vor Verunreinigungen geschützt. Die Unterseite des Bezuges hat eine rutschhemmende Beschichtung, die einen festeren Halt des Sitzkissens auf der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl u. a.) ermöglicht. Eine Trageschlaufe an der Einstiegsseite erleichtert die Handhabung und den Transport des Sitzkissens. Der Sitzkissenbezug ist abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Waschmitteln bei max. 60 °C gewaschen werden.



Gebrauchsanweisung SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Anwendung

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetriebV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen, und das bestehende Dekubitusrisiko sowie vorhandene Dekubitusgeschwüre beurteilen zu können.

- Überprüfen Sie das Antidekubitus-Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissens geeignet ist. Beachten Sie dabei die Anforderungskriterien der Sitzgelegenheit im Kapitel Anwendungsbereich.
- Öffnen Sie den Deckel der Kartonverpackung und entnehmen Sie das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
- Der PU-Sitzkissenbezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen. Legen Sie das SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissen mit der schwarzen, rutschhemmenden Unterseite auf die Sitzfläche der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl usw.). Die Trageschlaufe muss zum Einstieg zeigen.

• Pflege und Reinigung | Wiedereinsatz

Die Herstellung des SHP-PRIMAFOAM 6 Sitzkissens unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

• Maße

Artikelnummer mit Inkontinenzbezug	Abmessungen	Gewicht
K17990	40 x 40 x 6 cm	0,9 kg
K17991	42 x 42 x 6 cm	1,0 kg
K17992	45 x 42 x 6 cm	1,1 kg
K17993	48 x 42 x 6 cm	1,2 kg
K17994	50 x 45 x 6 cm	1,3 kg

• Technische Daten

Patientengewicht	40–120 kg
Material Raumgewicht Stauchhärte	viscoelastischer Schaum 85 kg/m ³ 2,2 kPa
Bezug	Sitzfläche: PU-Inkontinenzbezug; Unterseite: antirutsch PU; Seite: PU + PA

• Ansicht



• Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

