

## Gebrauchsanweisung SHP-TERRACARE DUPLEX Komfortpflegebettmatratze

### • Indikationen und Einsatzbereiche

Die SHP-TERRACARE DUPLEX ist eine Standardpflegebettmatratze aus hochelastischem Polyurethanschaum. Für behandelnde Maßnahmen wie Dekubitustherapie darf sie nicht eingesetzt werden.

### • Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-TERRACARE DUPLEX ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet. Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden! Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

### • Anwendungsbereich

Die SHP-TERRACARE DUPLEX ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-TERRACARE DUPLEX verhindern. Die Pflegebettmatratze SHP-TERRACARE DUPLEX kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-TERRACARE DUPLEX dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-TERRACARE DUPLEX ist lieferbar mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Inkontinenzbezug AG-PROTECT, welcher bei vorliegender Inkontinenz auf alle Fälle verwendet werden sollte!

Der Einsatz der SHP-TERRACARE DUPLEX ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Die Pflegebettmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

### • Funktionsbeschreibung

Die SHP-TERRACARE DUPLEX ist eine Schaumstoffmatratze mit Quereinschnitten. Durch die spezielle Schnitttechnik passt sich die Matratze optimal an die physiologischen Knickstellen des Pflegebettes bzw. Bettrahmens an. Sie wurde für ein Patientengewicht von 40–140 kg konzipiert. Die Pflegebettmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem schwer entflammaren Inkontinenzbezug AG-PROTECT ausgestattet. Diese schützen vor Verunreinigungen und sind in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 60 °C (Trikotbezug) bzw. bis 90 °C (Inkontinenzbezug) waschbar.

Die SHP-TERRACARE DUPLEX ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren. Beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten* und *Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.

### • Lagerung

Die entpackte SHP-TERRACARE DUPLEX darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



## Gebrauchsanweisung SHP-TERRACARE DUPLEX Komfortpflegebettmatratze


### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17749	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,8 kg
M17908	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	9,8 kg
M18690	200 x 90 x 12 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	9,0 kg
M18691	200 x 100 x 12 cm	Inkontinenzbezug AG-PROTECT blau	10,0 kg
M25360	200 x 90 x 12 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	9,0 kg
M25361	200 x 100 x 12 cm	Inkontinenzbezug ECO blau	10,0 kg

### • Technische Daten

Patientengewicht   BMI	40–140 kg   17–35
Raumgewicht   Stauchhärte   Eindruckhärte	40 kg/m <sup>3</sup>   3,7 kPa   150 N
Bezug	Inkontinenzbezug AG-PROTECT, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach CRIB 5 Inkontinenzbezug KOMFORT, schwer entflammbar nach CRIB 5 Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

### • Ansicht

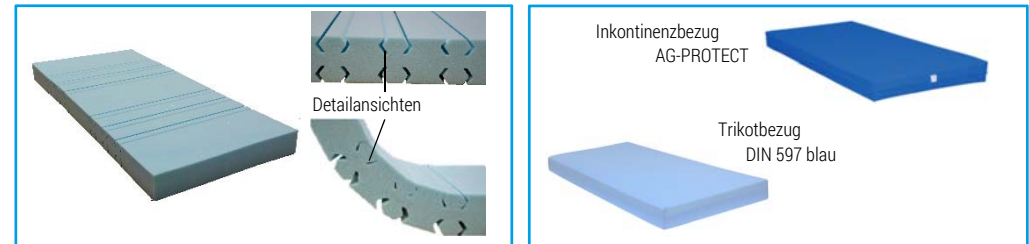

### • Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitze einwirkung. Es besteht Brandgefahr!

