

Gebrauchsanweisung SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze zur Dekubitusprophylaxe

• Indikationen und Einsatzbereiche

Die SHP-TERRAPLOT P ist ausschließlich für die Dekubitusprophylaxe geeignet. Durch die Lagerung ist eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und daher eine statische Druckentlastung möglich. Die SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze ist für schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

• Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-TERRAPLOT P ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein Inkontinenzbezug auf alle Fälle verwendet werden!
Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

• Anwendungsbereich

Die SHP-TERRAPLOT P ist für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-TERRAPLOT P verhindern. Die Pflegebettmatratze SHP-TERRAPLOT P kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-TERRAPLOT P dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 130 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze ist lieferbar mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Trikotbezug oder mit einem dunkelblauen, nach CRIB 5 schwer entflammaren Inkontinenzbezug ECO.

Der Einsatz der SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Lagerung des Patienten durchführen zu können. Die Prophylaxematratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

• Funktionsbeschreibung

Die SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze ist eine Schaumstoffmatratze mit strukturierter und unterbrochener Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte. Die SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze wird zur Dekubitusprophylaxe am ganzen Körper eingesetzt. Sie besteht aus einem hochelastischen PU-Schaumstoffkern, mit den Maßen 200 x 90 x 12 cm oder 200 x 100 x 12 cm, der mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten durchzogen ist. Dadurch entstehen 171 würfelartige Formen mit einer Auflagefläche von ca. 9 x 9 cm, die die Liegefläche bilden. Der Freiraum zwischen den einzelnen würfelartigen Formen macht das Ganze atmungsaktiver und verbessert das Mikroklima in der Matratze. Zudem wird die Oberfläche deutlich flexibler und kann sich so optimal den Körperkonturen anpassen. Der Auflagedruck wird auf eine wesentlich größere Fläche verteilt, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Auf Grund des Raumgewichtes, der Stauch- und Eindruckhärte wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 130 kg) verhindert. Die Pflegebettmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren blauen DIN Trikotbezug oder mit einem schwer entflammaren Inkontinenzbezug ECO ausgestattet. Diese schützen vor Verunreinigungen und sind in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 60 °C (Trikotbezug) bzw. bis 90 °C (Inkontinenzbezug) waschbar.



Gebrauchsanweisung SHP-TERRAPLOT P Würfelmatratze zur Dekubitusprophylaxe

• Lagerung

Die entpackte SHP-TERRAPLOT P darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17608	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,5 kg
M18684	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,4 kg
M17923	200 x 90 x 12 cm	Inkontinenzbezug ECO dunkelblau	7,8 kg
M18685	200 x 100 x 12 cm	Inkontinenzbezug ECO dunkelblau	8,7 kg

• Technische Daten

Patientengewicht	40–130 kg
Raumgewicht Stauchhärte	35 kg/m ³ 4,0 kPa
Bezug	Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II Inkontinenzbezug ECO, schwer entflammbar nach CRIB 5
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

• Ansicht

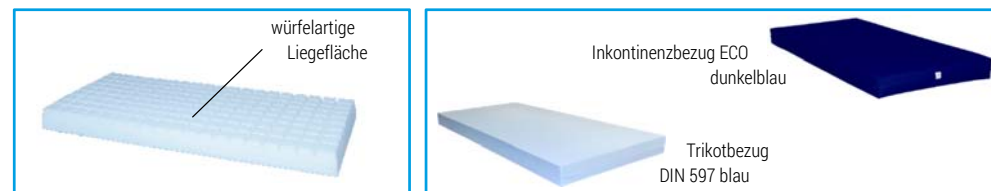

• Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigaretteglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

