

Gebrauchsanweisung TERRASOFT Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

• Produktbeschreibung

Die TERRASOFT ist eine einschichtige Pflegebettmatratze mit strukturierter und unterbrochener Liegefläche. Sie besteht aus einem hochelastischen PU-Schaumstoffkern, der auf der Oberseite mit acht schrägen Längseinschnitten durchzogen ist, die die Scherkraft reduzieren. Der Polyurethanschaum ist atmungsaktiv. Er wird FCKW-frei geschäumt und nach Oeko-Tex Standard 100 hergestellt und geprüft.

• Indikation

Die Pflegebettmatratze TERRASOFT ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund ihrer Krankheit, Behinderung oder aufgrund des Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist. Sie ist nur zur Dekubitusprophylaxe geeignet und darf nicht für behandelnde Maßnahmen eingesetzt werden.

• Anwendungsbereich

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der TERRASOFT verhindern. Die Pflegebettmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der TERRASOFT dürfen Patienten/Bewohner mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Für behandelnde Maßnahmen wie Dekubitustherapie darf sie nicht eingesetzt werden.

Die TERRASOFT ist für Patienten mit Schamstoffallergie nicht geeignet.

Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.

Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z.B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• Material | Pflege und Reinigung

Der Matratzenkern besteht aus Polyurethanschaum mit schrägen Längseinschnitten und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Der Bezug der Matratze ist ein standardmäßig einblauer, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammbarer Trikotbezug. Die Bezüge sind durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und können im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Wird der zusätzlich erhältliche PU-Bezug eingesetzt, sollte die Wisch- oder Sprühdeseinfektion ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

• Lagerung

Die entpackte TERRASOFT darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



Gebrauchsanweisung TERRASOFT Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M20977	190 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,1 kg	4056538998209
M17750	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,5 kg	4056538991392
M18680	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,5 kg	4056538991361

• Technische Daten

Patientengewicht BMI	40–140 kg 17–35 kg/m ²
Raumgewicht Stauchhärte Eindruckhärte	40 kg/m ³ 4,0 kPa 200 N
Trikotbezug blau	100 % Baumwolle
Brandschutznorm	DIN EN 597 Teil I + II
Pflege	Kern
	Bezug blau
Garantie	5 Jahre bei Bildung von Liegemulden

• Ansicht

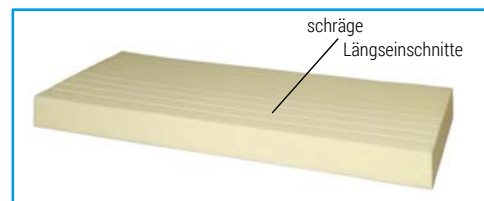

• Hinweis

Dieses Produkt kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

