

## Gebrauchsanweisung SHP-TERRASOFT DUO Komfortpflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

### • Indikationen und Einsatzbereiche

Die Pflegebettmatratze SHP-TERRASOFT DUO ist für die Dekubitusprophylaxe geeignet. Durch die schrägen Längseinschnitte ist eine gute Anpassung an den Patienten gegeben und es tritt eine statische Druckentlastung sowie Verringerung der Scherkräfte ein. Die SHP-TERRASOFT DUO ist für schmerzempfindliche Patienten besonders gut geeignet.

### • Anwendungsrisiken/Kontraindikation

Die SHP-TERRASOFT DUO ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

### • Anwendungsbereich

Die SHP-TERRASOFT DUO ist für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Bereich geeignet. Sie ist in jedem Pflegebett oder sonstigen „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der SHP-TERRASOFT DUO verhindern. Die Pflegebettmatratze SHP-TERRASOFT DUO kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht wird. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 220 mm betragen. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Auf der SHP-TERRASOFT DUO dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg gelagert werden. Die Matratze ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen. Die SHP-TERRASOFT DUO ist standardmäßig mit einem blauen, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammaren Trikotbezug ausgestattet.

Der Einsatz der SHP-TERRASOFT DUO ersetzt nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten!

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes prüfen, das Dekubitusrisiko sowie bestehende Dekubitusgeschwüre beurteilen und eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können. Die Weichlagerungsmatratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren.

### • Funktionsbeschreibung

Die SHP-TERRASOFT DUO ist eine Schaumstoffmatratze mit strukturierter und unterbrochener Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und Druckentlastung beim Patienten. Die SHP-TERRASOFT DUO wird zur Dekubitusprophylaxe am ganzen Körper eingesetzt. Der hochelastische PU-Schaumstoffkern mit den Maßen 200 x 90 x 12 cm oder 200 x 100 x 12 cm besteht aus einer durchgehenden, 8 cm starken, festen Trägerplatte und einer mit acht schrägen Längseinschnitten durchgezogenen, etwas weicheren Deckplatte. Dadurch entsteht eine Luftdrainage, die die Liegefläche strukturiert. Diese schrägen Längseinschnitte machen die Matratze sehr atmungsaktiv und verbessern das Mikroklima. Zudem wird die Oberfläche deutlich flexibler und kann sich so optimal den Körperkonturen anpassen. Der Auflagedruck wird auf eine wesentlich größere Fläche verteilt, wodurch sich die Durchblutung der Gewebeareale verbessert und sich das Risiko eines Dekubitus minimiert. Auf Grund der zwei unterschiedlichen Schaumstoffschichten mit verschiedenen Raumgewichten, Stauch- und Eindruckhärten wird ein Durchliegen von schwereren Patienten (bis 140 kg) verhindert. Die Pflegebettmatratze ist mit einem abnehmbaren, atmungsaktiven und schwer entflammaren blauen DIN Trikotbezug ausgestattet. Dieser schützt vor Verunreinigungen und ist in einer Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bis 60 °C waschbar.

### • Lagerung

Die entpackte SHP-TERRASOFT DUO darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



## Gebrauchsanweisung SHP-TERRASOFT DUO Komfortpflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe


### • Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht
M17607	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,5 kg
M18679	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	9,5 kg

### • Technische Daten

Patientengewicht   BMI	40–140 kg   17–35 kg
Raumgewicht   Stauchhärte   Eindruckhärte	Trägerkern: 40 kg/m <sup>3</sup>   2,5 kPa   130 N Deckplatte: 36 kg/m <sup>3</sup>   4,5 kPa   200 N
Bezug	Trikotbezug blau, schwer entflammbar nach DIN ISO 597 Teil I+II
Garantie	5 Jahre auf Bildung von Liegemulden

### • Ansicht

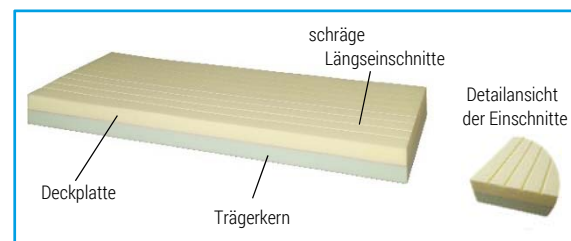

### • Hinweis

Lesen Sie bitte vor jedem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für eine sachgerechte Anwendung notwendig sind.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!

