

Gebrauchsanweisung DEKU BASIC (HMV-Nr. 11.29.05.1042)

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• **Produktbeschreibung**

Die Matratze DEKU BASIC besteht aus einem einschichtigen, elastischen Polyurethan-Schaumstoffkern, der mit Einschnitten unterschiedlicher Tiefe und Formung in Querrichtung der Matratze durchzogen ist. Diese bewirken eine strukturierte Liegefläche mit verschiedenen Liegezone. Die Schaumstoffkomponente ist mit einem Trikotbezug aus Polyesterwebgewebe umhüllt oder von einem abnehmbaren Polyurethanvollschutzbezug (Inkontinenzbezug) vollflächig umgeben.

• **Indikation**

Die DEKU BASIC dient als druckentlastendes Hilfsmittel zur Verhinderung des Auftretens (Prophylaxe) und zur Behandlungsunterstützung (Therapie) von Dekubitalulzerationen im Zusammenspiel mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen. Sie ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder aufgrund ihres Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist, das Risiko eines Dekubitus besteht bzw. die Behandlungsunterstützung eines bereits bestehenden Dekubitus indiziert ist. Sie ist für schmerzempfindliche Patienten/Bewohner geeignet.

• **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die Matratze DEKU BASIC wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die unterbrochene, strukturierte Liegefläche aus Polyurethan-Schaumstoff ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an die anatomischen Körperkonturen des Patienten, wobei sich der Auflagedruck auf eine wesentlich größere Fläche verteilt. Die daraus resultierende hohe statische Druckentlastung verbessert sich die Durchblutung der aufliegenden Gewebeareale und das Risiko eines Dekubitus wird minimiert.

• **Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Dieses muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKU BASIC verhindert. Die Weichlagerungsmatratze DEKU BASIC kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und nicht ohne Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden.

Die DEKU BASIC ist für die Anwendung bei Patienten mit einem Gewicht von 20 kg bis maximal 120 kg vorgesehen. Die Nutzung sollte bei 10 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur erfolgen.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die DEKU BASIC ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen! Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nur bei den Artikelnummern M33574 und M33575 im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen. Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarette, Kerze). Es besteht Brandgefahr! Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Seite mit den Einschnitten die Oberseite und Liegefläche bildet.

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich. Er muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

• **Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus einem Polyurethan-Schaumstoff und kann bei Bedarf vom Anwender mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 105 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein nach DIN EN 597 schwer entflammbarer Trikotbezug. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Wird der zusätzliche PU-Bezug eingesetzt, sollte die Wisch- oder Sprühdeseinfektion ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) oder das Robert Koch-Institut (RKI) geprüft und zugelassen sind. Dieser Inkontinenzbezug kann in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 95 °C gewaschen werden. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die Aufbereitung der gesamten Einheit aus Vollschutzbezug und Schaumstoffkern kann – bei geöffnetem Reißverschluss des Bezuges – schonend mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bei 105 °C erfolgen.



Gebrauchsanweisung DEKU BASIC (HMV-Nr. 11.29.05.1042)

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

Die DEKU BASIC ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreibV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

• Lagerung | Entsorgung | Rücksendung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze DEKU BASIC schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten. Die DEKU BASIC darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte. Die Annahme von Retouren bei SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG erfolgt nur mit ausgefülltem und unterzeichnetem Hygienestatus (Retourenformular). Veraltete oder defekte Produkte sind vor der Entsorgung zu reinigen und zu desinfizieren.



• Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M31075	200 x 90 x 12 cm	Trikotbezug	6,5 kg	4056538002432
M33574	200 x 90 x 12 cm	Inkontinenzbezug ECO	7,0 kg	4056538002838
M31076	200 x 100 x 12 cm	Trikotbezug	6,7 kg	4056538002449
M33575	200 x 100 x 12 cm	Inkontinenzbezug ECO	7,3 kg	4056538002807

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.29.05.1042			
Patientengewicht	20–120 kg			
Raumgewicht • Stauchhärte	32 kg/m ³ • 3,0 kPa			
Material Trikotbezug • Brandschutznorm	Polyester • schwer entflammbar nach DIN EN 597			
Material Inkontinenzbezug • Brandschutznorm	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung • schwer entflammbar nach BS 7175 - Crib 5			
Pflege	Kern			
	Trikotbezug			
	Inkontinenzbezug			

• Ansicht

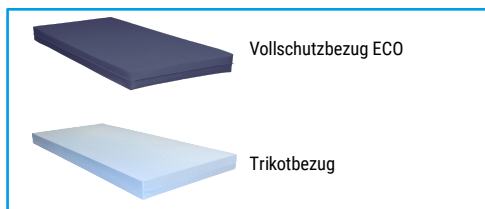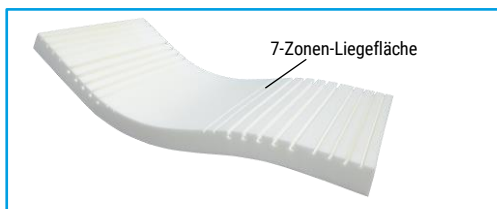

• Hinweis

Die Anwendung dieses Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

