

Gebrauchsanweisung DEKUSOFT VISCO RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

bund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die Aufbereitung der gesamten Einheit aus Vollschutzbezug und Schaumstoffkern kann – bei geöffnetem Reißverschluss des Bezuges – schonend mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bei 75 ° C erfolgen.

Die DEKUSOFT VISCO RZ ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreibV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

• Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze DEKUSOFT VISCO RZ schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten. Die Matratze darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (B x T x H)	Ausführung/Bezug	Gewicht	GTIN
M17734	200 x 90 x 16 cm	Vollschutzbezug Komfort	13,0 kg	4056538998513
M17818	200 x 100 x 16 cm	Vollschutzbezug Komfort	14,1 kg	4056538998605

• Technische Daten

Patientengewicht	25–120 kg			
Raumgewicht • Stauchhärte	Liegeschicht:	50 kg/m ³ • 1,2 kPa		
	Trägerschicht:	40 kg/m ³ • 3,7 kPa		
	Randzone:	50 kg/m ³ • 8,0 kPa		
Material Inkontinenzbezug	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung			
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach BS 7175 – Crib 5			
Pflege	Kern			
	Inkontinenzbezug			
Garantie	5 Jahre bei Bildung von Liegemulden			

• Ansicht

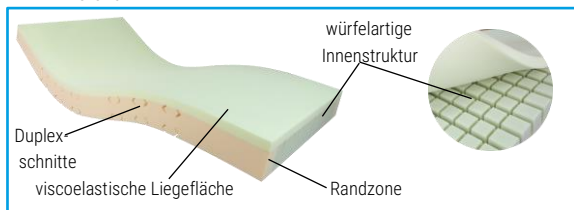

• Hinweis

Die Anwendung des Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

