

Gebrauchsanweisung TERRASOFT DUO

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

• **Produktbeschreibung**

Die Pflegebettmatratze TERRASOFT DUO besteht aus einem hochelastischen PU-Schaumstoffkern und einer Weichlagerungsliegefläche, deren Oberseite mit acht schrägen Längseinschnitten durchzogen ist. Sie ist von einem Trikotbezug umgeben.

• **Indikation**

Die TERRASOFT DUO dient als druckverteilendes Hilfsmittel zur Verhinderung des Auftretens (Prophylaxe) von Dekubitalulzerationen und ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder aufgrund ihres Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist und das Risiko eines Dekubitus besteht.

• **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die Matratze TERRASOFT DUO bewirkt durch die Kombination von Weichlagerungsliegefläche und schrägen Längseinschnitten die Druckverteilung auf eine größere Auflagefläche und reduziert somit den Auflagedruck. Dadurch wird die Durchblutung gefährdeter Gewebeareale verbessert und das Risiko eines Dekubitus minimiert. Die nach dem Weichlagerungsprinzip wirkende Matratze passt sich gut den Körperkonturen des Patienten/Bewohners an und ermöglicht einen angenehmen Liegekomfort. Die Längseinschnitte sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation innerhalb des Schaumstoffkerns.

• **Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Dieses muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der TERRASOFT DUO verhindern. Die Pflegebettmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und nicht ohne Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden.

Die TERRASOFT DUO ist für die Anwendung bei Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 140 kg vorgesehen.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die TERRASOFT DUO ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.

Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzschutzbezuges. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.

Der Patient darf keine direkten, andauernden Hautkontakte mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z.B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreiV) verbindlich. Er muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

• **Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus zwei Schichten Polyurethanschaum und kann bei Bedarf vom Anwender mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 105 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein blauer, nach DIN EN 597 schwer entflammbarer Trikotbezug. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) oder das Robert Koch-Institut (RKI) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.



Gebrauchsanweisung TERRASOFT DUO

Pflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe

• Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze TERRASOFT DUO schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten.

Die Matratze und darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.



• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (B x H x T)	Bezug	Gewicht	GTIN
M17607	200 x 90 x 12 cm	Trikotbezug	8,5 kg	4056538999114
M18679	200 x 100 x 12 cm	Trikotbezug	9,5 kg	4056538995437

• Technische Daten

Patientengewicht	40–140 kg			
Raumgewicht • Stauchhärte • Eindruckhärte	Liegeschicht:	40 kg/m ³ • 2,5 kPa • 130 N		
	Trägerschicht:	36 kg/m ³ • 4,5 kPa • 200 N		
Material Trikotbezug blau • Brandschutznorm	Polyester-Baumwoll-Gemisch • schwer entflammbar nach DIN EN 597			
Pflege	Kern			
	Trikotbezug			

• Ansicht

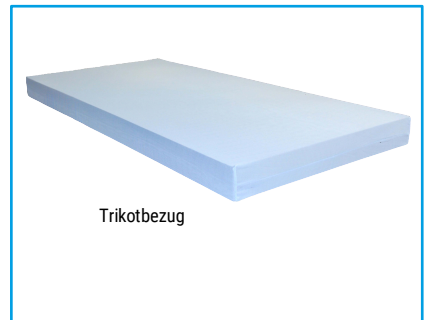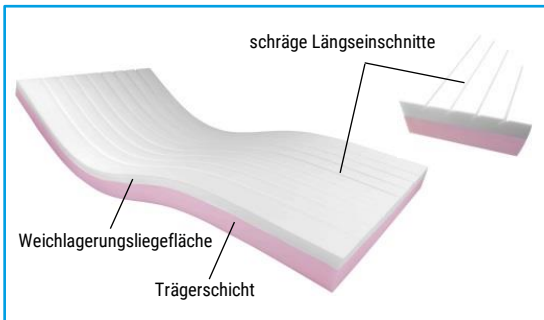

• Hinweis

Die Anwendung dieses Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.