

Gebrauchsanweisung TERRAPUR

Standardpflegebettmatratze

• **Produktbeschreibung**

Die TERRAPUR ist eine Standardpflegebettmatratze aus einem einteiligen elastischen PU-Schaumstoffkern RG 35, der keinerlei Längs- und Quereinschnitte aufweist. Auf Grund des wirksamen Zusammenspiels von Raumgewicht, Stauch- und Eindruckhärte wird ein angenehmer Liegekomfort erreicht und ein Durchliegen von Patienten (bis 125 kg) verhindert. Der Polyurethanschaum ist atmungsaktiv. Er wird FCKW-frei geschäumt und nach Oeko-Tex Standard 100 hergestellt und geprüft.

• **Indikation**

Die Pflegebettmatratze TERRAPUR ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund ihrer Krankheit, Behinderung oder aufgrund des Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist. Sie ist nicht zu Therapiezwecken geeignet und darf nicht für behandelnde Maßnahmen eingesetzt werden.

• **Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der TERRAPUR verhindern. Die Pflegebettmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die Matratze darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und einem Bettlaken benutzt werden.

Auf der TERRAPUR dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 125 kg gelagert werden.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Für behandelnde Maßnahmen wie Dekubitustherapie darf sie nicht eingesetzt werden.

Die TERRAPUR ist für Patienten mit Schaumstoffallergie nicht geeignet.

Bei Inkontinenz empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Inkontinenzbezuges. Dieser Bezug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze.

Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten/Bewohner Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen.

Der Patient darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben.

Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z.B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

• **Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus Polyurethanschaum mit einer ununterbrochenen Liegefläche und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein blauer, nach DIN 597 Teil I und II schwer entflammbarer Trikotbezug. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Wird der zusätzlich erhältliche PU-Bezug eingesetzt, sollte die Wisch- oder Sprühdeseinfektion ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.



Gebrauchsanweisung TERRAPUR Standardpflegebettmatratze

Lagerung

Die entpackte TERRAPUR darf nur sauber, trocken und eben gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.

Maße

Artikelnummer	Abmessungen	Bezug	Gewicht	GTIN
M17997	200 x 90 x 10 cm	Trikot DIN blau	6,6 kg	4056538991385
M17982	190 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,5 kg	4056538994560
M17610	200 x 90 x 12 cm	Trikot DIN blau	7,8 kg	4056538999138
M17907	200 x 100 x 12 cm	Trikot DIN blau	8,6 kg	4056538999169

Technische Daten

Patientengewicht	40–125 kg			
Raumgewicht Stauchhärte	35 kg/m ³ 4,0 kPa			
Trikotbezug blau	100 % Baumwolle			
Brandschutznorm	DIN EN 597 Teil I + II			
Pflege	Kern			
	Trikotbezug			

Ansicht



Hinweis

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.